

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GM 4021 FIX SZOBAI WC



Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi kérdések esetére. A jelen leírás az eszköz használati utasításait tartalmazza.



1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A betegápolás egyik legfontosabb mozzanata, hogy a betegek megfelelő körülmények között tudják elvégezni alapvető fiziológiai szükségleteiket. Egy nehezen mozgó ember mindennapi teendőinek elvégzése megterhelő lehet megfelelő segédeszközök hiányában. A szobai WC alkalmas lehet a házi betegápolás megkönnyítésére, vagy kiválóan alkalmazható kórházakban, szociális és egyéb ápolási intézményekben. Minden olyan esetben javasolt lehet használata, amikor egy fizikailag nagyon gyenge, vagy mozgáskorlátozott személy az önellátásra képtelen, így a mellékhelyiséget nem tudja megközelíteni. A fedőlap használatával szobai székként, ülőkeként is használható.

2. SZAKKÉPESÍTÉSI-KÖVETELMÉNY

Ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, gyermeksebészet, sebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat), neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, geriátria, reumatológia, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is.

3. INDIKÁCIÓ

Önellátásra tartósan képtelen mozgáskorlátozott betegek részére.

4. MŰSZAKI ADATOK

- A toalettsték vázszerkezete hajlított acélcső, amely hegesztési eljárással készült
- A váz felülete porszórással van festve, a felhasznált kötőelemek galvanizáltak
- Műanyag dugó zárja le a csővégeket.
- Az ülőke vízhatlan műbőrrel kárpitozott, illetve szivaccsal bevont lap, amelynek nyílása alá a műanyag gyűjtőedény csúsztható
- A kartámasz szivaccsal párnázott.
- A keresztmerevítőnek köszönhetően a szék könnyen összecukható, elegendő a vázra fűzött kötelek fölfelé irányuló meghúzása
- A lábak végén gumitalpak találhatók.
- Csomagolás mérete: 50*24*85 cm

Szélesség	Hossz	Magasság	Beülő mélység	Maximális terhelhetőség	Saját tömeg	Háttámla magassága	Ülés magasság
53 cm	48 cm	80 cm	45 cm	100 kg	9 kg	32,5 cm	47,5 cm

5. HASZNÁLAT

Az ülőlap alatt műanyagból készült gyűjtőedény található a vizelet és a széklet gyűjtésére. A toalettsték ülőlapjából a takaró elem kiemelésével használható a gyűjtőedény. A gyűjtőedény könnyedén kihúzható a vezetősínen előre csúsztatva. Használat esetén ajánlott a műanyag gyűjtőedényt vízzel feltölteni.



A fix szobai WC-szék csak függőlegesen terhelhető!



A használati útmutatótól eltérő használatból, túlterhelésből, átalakításból és helytelen kezelésből eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget, így a jótállás nem érvényesíthető!

6. TISZTÍTÁS

Fertőtlenítő hatású háztartási tisztítószerrel tisztítható használat után. Mosás után bő vízzel öblítse le, és száraz ruhával törölje át!



Feltétlenül fontos higiéniai szempontból, hogy a wc-széket, és a hozzá tartozó edényt minden használat után alaposan meg kell tisztítani, hogy további használatra higiénikus és alkalmas legyen! Javasolt a műanyag gyűjtőedény rendszeres fertőtlenítése is!

7. KARBANTARTÁS

A termék karbantartást nem igényel, időszakosan érdemes ellenőrizni az alkatrészeket.

8. GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ



Gyártó és forgalmazó:
Patella-96 Kft.
H-2045 Törökbálint
Kisfaludy u 49-1.
Tel.: +36 1 248 5300
info@patellamedical.hu
www.gyogybolt.hu
www.gmed.hu
www.epapucs.hu



Distributor:
SC Vital Logistic Srl.
540210 Tirgu Mures
str Gheorghe Doja nr 177
Corp C1-C2 Parter, Romania
comenzi@vital-logistic.ro
Tel.: +40 265 265 268
www.vital-logistic.ro

9. VONALKÓD



Kék 5 9 9 9 5 4 2 9 7 9 7 8 1



Szürke 5 9 9 9 5 4 2 9 7 8 3 0 2