


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GM 4260 ALUMÍNIUM ROLLÁTOR

 Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi kérdések esetére. A jelen leírás az eszköz használati utasításait tartalmazza.



Kérjük, rögtön a kézhezvétel után - ha lehet az átadó jelenlétében - győződjön meg a termék sértetlenségéről. Óvatosan távolítsa el az összes csomagolást. Ne használjon kést vagy más éles eszközt, amelyek károsíthatják a termék felületét. Ellenőrizze a terméket, hogy van-e rajta bármilyen látható sérülés. Ha bármilyen sérülést észlel vagy hibára gyanakszik, ne használja a terméket, hanem forduljon az átadóhoz segítségért.

1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A guruló járókeretek, ismertebb nevükön rollátorok, a bizonytalan járású, vagy járáshibás egyének helyváltoztatásának segítő eszköze. Használatuk azok számára javasolt, akik önállóan mozgásra képesek, csak kisebb segítségre van szükségük a megfelelő járásbiztonság eléréséhez, és képesek a fékkarokat önállóan működtetni. Fizikai gyengeség, szédülés esetén, illetve a nagyobb távolságok megtételekor gyakran pihenőre, megállásra, leülésre kényszerülők számára ideálisan használható. Járás közben nagyfokú stabilitást biztosíthatnak, illetve fékezhetőségük miatt segíthetnek az elcsúszások okozta sérülések, balesetek megelőzésében. Ideális választás lehet azok számára, akik az alsó végtagjaik ízületi kopásának fájdalmától, gyulladásától, reumás vagy egyéb mozgásszervi panasztól szenvednek. Baleset vagy betegség következtében kialakult alsóvégtagi sérülések esetén szintén javasolt lehet használata. Gyermekkori fejlődési rendellenesség, vagy bénulás következtében kialakult nehézkes járás esetén. Az alsó végtag protézisálása, csípőtáji törések műtéti beavatkozás utáni felépülés időszakában járása nehézkessé vált emiatt segítségre szorul. Fizikai gyengeség, egyensúlyzavar, ill. mozgáskoordinációs problémák esetén is azonnali megoldást nyújthat.


Indikáció: Alsóvégtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, fejlődési rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége esetén, alsóvégtag-sérülések postoperatív vagy konzervatív ellátására, alsóvégtag amputáció és protézisálás postoperatív fázisában, egyensúlyzavar esetén.

Felírásra jogosult orvosok meghatározása: ortopédia-traumatológia, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat), fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, reumatológia, sebészet, gyermeksebészet, érsebészet, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, geriátria, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is

2. MŰSZAKI PARAMÉTEREK

- Mérete: hosszúság 68 cm * szélesség 66 cm * magasság 81-93,5 cm
- Megfelel bel- és kültéri használatra is, lakáson kívül kiválóan alkalmas járássegítő eszköz, kerekein és bevásárló táskáján fényvisszaverő prizmával és csíkokkal ellátott, így sötétben is használható
- 4 db nagy tömör kerék, az elülső és hátulsó kerekek 20 cm átmérővel rendelkeznek
- Könnyebb kanyarodás érdekében az első úgynevezett elülső bolygókerekekkel van szerelve
- Súlya mindössze 8,1 kg
- Maximálisan 136 kg-ig terhelhető
- Keresztvázas felépítésének köszönhetően összecukható, jól kezelhető és könnyen szállítható
- A felszínek kialakítása és kezelése miatt jól tisztítható a termék

- Csomagolás mérete: hosszúság 63,5 cm * szélesség 33 cm * magasság 34 cm

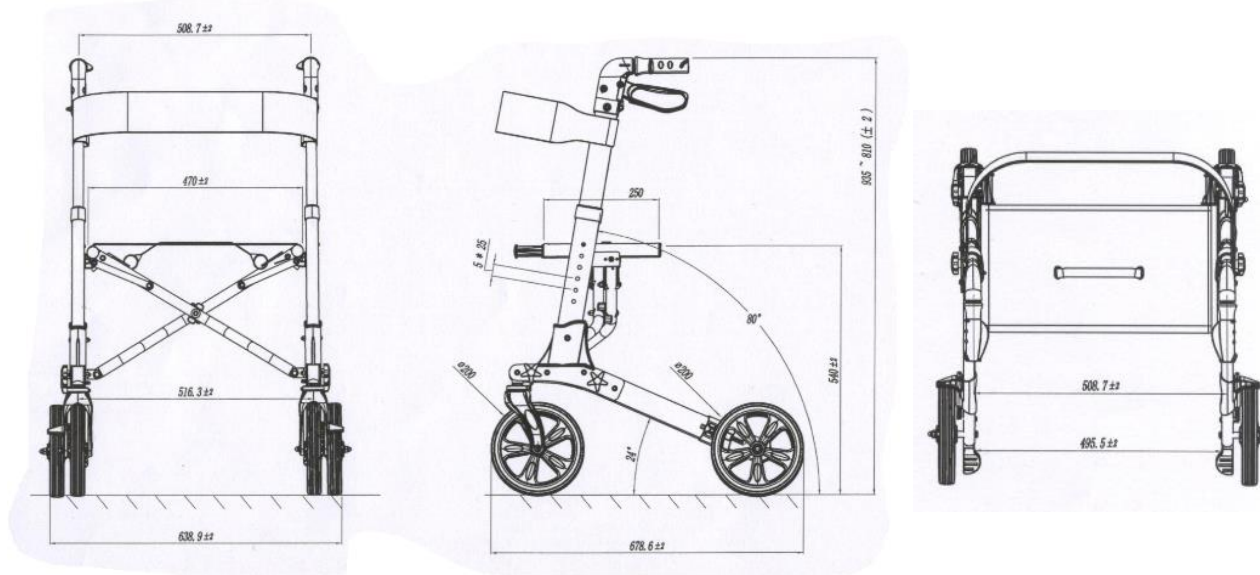

3. A ROLLÁTOR RÉSZEINEK FELSOROLÁSA



1. Markolat: érdesített puha gumi tenyértámasszal, és bütykökkel ellátva az ujjak megtámasztására, kényelmes megtámaszkodásra szolgál, magassága állítható 6 szinten, 81- 93,5 cm között
2. Fékkar: egyszerűen kezelhető kézi fékezés, rögzítő mechanizmussal felszerelve így beüléshez fixen lefékezhető, anyaga fekete műanyag, a rollátor lassítására és rögzítésére szolgálnak, fékkarja széles, használatkor nem vágja az ujjakat, a fékezőerő állítható és jól adagolható
3. Az első kerék összecukási mechanizmusának gombjai: az első kerék behajtása összecukáshoz
4. Háttámla: könnyen tisztántartható nejlon gyöngyvászon, fekete színű, kissé kimerevített és párnázott, jó tartást biztosít
5. Hálós ülés: könnyen tisztántartható fekete színű nejlon szövetháló, ülőfelülete és erős háttámlája maximális kényelmet és a pihenés lehetőségét biztosítja, extra széles méretezése (66 cm) megfelel nagy súlyú, széles csípőjű betegek számára is, ülésmagassága 55 cm
6. Bevásárló táska: könnyen tisztán tartható nejlon gyöngyvászon anyagból, előre felhelyezhető, 25 liter űrtartalom, 30 kg-ig terhelhető, használható bevásárláshoz, fényvisszaverő csíkkal ellátva
7. Az hátsó kerék összecukási mechanizmusának gombjai
8. Első kerék: forgószármolyos villa segítségével az eszköz könnyen stabilan irányítható, 20 cm átmérőjű PVC+ PP első kerék, fényvisszaverő prizmákkal ellátva
9. Hátsó kerék: 20 cm átmérőjű PVC + PP hátsó kerék
10. Sétabot tartó: fekete színű műanyag, járóbot vagy mankó hordására szolgál
11. Váz: hegesztett, kellően vastag alumínium ötvözetből készült, összecukható, porszórással ezüstre festve, esztétikus kialakítású, könnyen összeszerelhető és stabilan rögzíthető
12. Keresztmerevítő: alumínium, egykeresztű, fekete porszórt bevonattal, amely a váz összecukását teszi lehetővé.

4. ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

A rollátor szétnyitása


1. Csatolja ki a tépő zárt, és távolítsa el a hátsó kerék összecukási mechanizmusának gombjait. (1. ábra)



1. ábra

2. ábra

2. Fordítsa hátra a hátsó kerék karját. (2. ábra)
3. Helyezze be és húzza meg szorosan a hátsó kerék összecukási mechanizmusának gombjait, biztosítva a megfelelő illesztést.
4. Távolítsa el az első kerék összecukási mechanizmusának gombjait. (1. ábra)
5. Fordítsa előre az első kerék karját. (3. ábra)

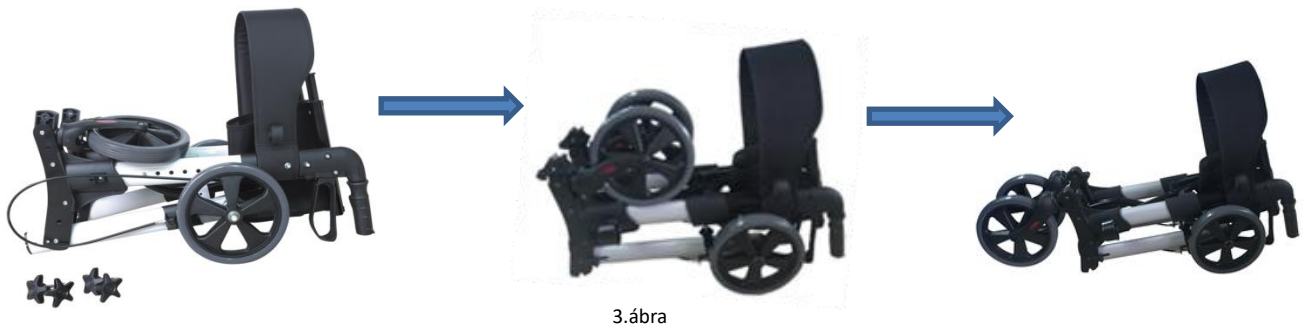


3. ábra

6. Helyezze be és húzza meg szorosan az első kerék összecukási mechanizmusának gombjait, biztosítva a megfelelő illesztést.
7. Húzza szét a két fogantyút egymástól.
8. Nyissa ki a keretet, amíg a kereszttartó reteszelő mechanizmusa automatikusan be nem záródik, mindkét szélét lenyomva ellenőrizze, hogy az ülés megfelelően rögzítve van-e. (4. ábra)



4. ábra

 Győződjön meg róla, hogy a kereszttartó reteszelő mechanizmusa és a hátsó kerék összecukási mechanizmusa a használat előtt szorosan rögzítve van.



5. ábra

A rollátor összecukás


Távolítsa el a tartozékokat, és szükség esetén engedje le a fogantyút. Emelje fel a kereszttartó reteszelő mechanizmus hálós ülésen található kiengedő szíját, hogy kinyissa a kereszttartó reteszt. Csatolja össze a keretet a bal oldalon látható módon (5. ábra). Nyomja össze a két fogantyút. Engedje ki az első és hátsó kerék összecukási mechanizmus gombjait, és fordítsa hátsó kerék karját befelé, helyezze vissza az összecukási mechanizmus gombjait, és zárja a tépőzárát a hátsó lábaknál.



6.ábra

A bevásárló táská felszerelése

Csatlakoztassa a táskát az üléskeret kampójához. A bevásárlótáska könnyedén leválasztható a használat során. (6. ábra)

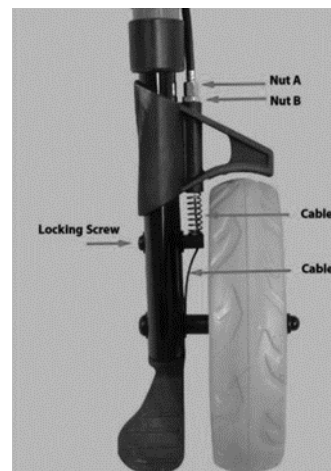

9. ábra

A fék beállítása

A rollátor fékrendszerének rendszeres beállításra van szüksége.

A fékek beállításához lazítsa meg a B anyát (Nut B), majd csavarja be/ki az A anyát (Nut A). Ha beállította, húzza meg újra a B anyát. Ha további beállításokra van szükség, akkor lazítsa meg a reteszelőcsavart, majd egy fogó segítségével kb. egy milliméterrel húzza le a kábelt (Cabel). Húzza meg a reteszelőcsavart. A fékeket ezután még tovább lehet állítani a B anya lazításával és az A anya be/kicsavarásával (9. ábra)



A fékek működtetése

1. A megálláshoz óvatosan gyakoroljon nyomást mindkét fékre egyszerre, ez lassítja és megállítja a rollátort.
2. A rollátoron lévő fékek rögzítési opcióval rendelkeznek (10. ábra). Ennek az opciónak a működtetéséhez egyszerre nyomja lefelé mindkét féket. Érezni fogja, hogy a fék egy kicsit kattán. A fékek így "zárt" helyzetben vannak.
3. A kioldáshoz egyszerűen csak húzza fel ismét a féket, és hallani fog egy kis kattánást, ahogy a "parkolás" kiold.



10.ábra



11.ábra

A fogantyúk magasságának beállítása különböző felhasználóknak

Nyomja meg a fogantyúkhöz tartozó gombokat és húzza felfelé vagy lefelé a fogantyút. Amint a fogantyú elmozdul, engedje fel a gombokat. Ez automatikusan rögzíti a következő lehetséges magasságban. Ismétlje meg ezt a műveletet, amíg el nem érte a kívánt magasságot. (11. ábra)

5. A TERMÉK TISZTÍTÁSA

Fertőtlenítő hatású háztartási tisztítószerrel tisztítható. A háztartásokban használt nem agresszív, fertőtlenítő, semleges hatású tisztítószerekkel tisztítható. A mosás után tiszta vízzel öblítse le, majd száraz ruhával törölje át! Semmilyen körülmények között ne használjon súroló vagy oldószeres tisztítószeret, mivel ez súlyosan károsíthatja a rollátort, és érvényteleníti a garanciát.

6. HASZNÁLAT

⚠️ A rollátort csak egyenletes felületeken pl.: járda vagy lakás használja. Nem szabad durva terepen vagy kátyús felületeken használni. A rollátor használata ezeken a felületeken súlyosan veszélyeztetheti az Ön biztonságát, és javíthatatlanul károsíthatja is a rollátort.

⚠️ A terméket kizárólag a rendeltetési céljának megfelelően használja, ami a járás segítése, ezért soha ne használja bármilyen egyéb célra pl. ne használja a terméket létraként, és ne álljon rá.


Ha nincs használatban, egyszerűen csak hajtsa össze a rollátort, és tárolja, amíg újra nem lesz rá szüksége.

⚠️ Ne engedje, hogy a gyerekek játszanak vele. A gyártó a termékfelelősség körében sem felel olyan veszély- és károkozásért, melyek felügyelet

nélküli gyermekekkel történhetnek a termék használata kapcsán.


7. KARBANTARTÁS

Ellenőrizze, hogy az összes kerék és az összecukási mechanizmus megfelelően működik, és minden kerék szabadon mozog. Különös figyelmet kell fordítani az első kerekekre, biztosítva, hogy azok szabadon és akadálytalanul forogjanak, és biztonságosan rögzítve legyenek a kerethez.

 Ne használja a rollátort, ha bármelyik kerék nehezen fordul, vagy úgy tűnik, hogy nincsenek megfelelően rögzítve a kerethez, vagy ha sérülésre vagy bármilyen más hibára gyanakszik.

Rendszeresen ellenőrizze rollátorát: napi szinten szemrevételezéssel ellenőrizze használat előtt, hogy a rögzítőelemek erősen meg vannak húzva. Havonta ellenőrizze, hogy az összes rögzítőcsap megfelelően rögzítve van-e. Ellenőrizze, hogy nincs-e laza alkatrész. Ellenőrizze a fékek beállítását és a kerekeket. Javasoljuk továbbá, hogy a rollátort 3 havonta szervizeltesse.

Gondosan ellenőrizze az eszköz alkatrészeinek állapotát. Ha úgy tűnik, hogy valamelyikük nincs megfelelő állapotban és az egység hibás, addig ne használja az eszközt amíg eredeti alkatrészsel nem lett megszerelve. Lépjen kapcsolatba a gyártóval szervizelés céljából.

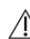 Ne használjon semmilyen másik vállalat által gyártott alkatrészt vagy tartozékot a GM 4260 rollátorhoz. Ha így tesz, az érvényteleníti a jótállást, és súlyosan veszélyeztetheti az Ön biztonságát. A tartozék táska is kifejezetten a GM 4260 rollátorhoz készült. Ne használja vagy kombinálja más gyártók táskáival és/vagy kosaraival.

8. VONALKÓD



9. GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ

Tájékoztatjuk, hogy az eszközzel kapcsolatban előforduló váratlan eseményeket jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságának. A magyarországi illetékes hatóság: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet.



Gyártó és forgalmazó:

Patella-96 Kft.

HU-2045 Törökbálint

Kisfaludy u 49-1.

Tel.: +36 1 248 5300

info@patellamedical.hu

www.gyogybolt.hu

www.gmed.hu

www.epapucs.hu



Distributor:

SC Vital Logistic Srl.

RO-540210 Tirgu Mures

str Gheorghe Doja nr 177

Corp C1-C2 Parter

comenzi@vital-logistic.ro

Tel.: +40 265 265 268

www.vital-logistic.ro

**Reklamáció esetén
kapcsolatfelvétel:**

reklamacio@patellamedical.hu



+36-30-471-3237

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jótállás határideje a termék fogyasztó részére való átadásától vagy az üzembe helyezettől (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el) számított 2 vagy 3 év az eladási ártól függően. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyeztetni üzembe, akkor az átadás napja lesz a jótállás kezdő időpontja.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza) és a megfelelő üzemben tartás is,
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet. Kicserélésnek van helye már az első javítási kísérletet követően, ha megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, és a fogyasztó másik igény teljesítését nem kéri. A fogyasztó akkor is kérheti a kicserélést, ha a kijavítási igény közlését követő harminc napon belül nem kerül sor a kijavításra. A kicserelési igényt az is megalapozza, ha a fogyasztási cikk a jótállási idő alatt három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, feltéve, hogy a fogyasztó nem kéri másik igény teljesítését.
- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicsereléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másira térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezettől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időbe a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetészerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellek- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. A fogyasztó a jótállás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is bejelentheti. A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles. A gyártó vállalkozás a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállásról értelmében az egyéves kihordási idejű és bruttó 10.000 Ft feletti értékű eszközre, valamint annak tartozékaira és alkotórészeire és más, a rendelet hatály alá tartozó eszközre 24 hónap jótállást vállal, a 2. § (1) értelmében 250.000 Ft eladási ár felett három év a vállalt jótállási idő. Jótállás nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészek (pl. kerekek, húzatok...) rendes elhasználódására, mindez azonban nem érinti a fogyó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználataszerinti „hibás” volta esetén fennálló jótállási kötelezettséget.

A nem rendeltetészerű használatból eredő hibákra a jótállás nem vonatkozik, amelynek feltételeit a használati útmutató tartalmazza. Jótállási igényét a kiszolgálás helyén is érvényesítheti. A jótállási idő kezdete a kiszolgálás napja. Ha az eszközt javítják, annak jótállása meghosszabbodik azzal az idővel, amíg a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetészerűen nem használhatta.

Reklamáció esetén
kapcsolatfelvétel:



reklamacio@patellamedical.hu



+36-30-471-3237

Kiszolgáló neve és címe:

Termék megnevezése:

Termék gyártási száma: (amennyiben van)

Gyártó/Vállalkozás neve és címe:

Vásárlás időpontja:

A termék vételára:

A termék fogyasztó részére való **átadásának*** vagy (amennyiben azt a forgalmazó, illetve annak megbízottja végzi) az **üzembe helyezés*** időpontja:

* a megfelelő aláhúzendó

P.H.:

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jóváállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:


A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A javítás-kijavítás időtartamával meghosszabbított -új határideje:

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

Kicserélés történt, amelynek időpontja:

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ROLATOR DIN ALUMINIU GM 4260

 Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și păstrați-l pentru referințe viitoare. Această descriere conține instrucțiuni pentru utilizarea dispozitivului.



Vă rugăm să vă asigurați că produsul nu este deteriorat imediat după primire, dacă este posibil în prezența persoanei care l-a furnizat. Îndepărtați cu grijă toate ambalajele. Nu folosiți cuțite sau alte instrumente ascuțite care ar putea deteriora suprafața produsului. Verificați dacă produsul prezintă deteriorări vizibile. Dacă observați orice deteriorare sau suspectați o defecțiune, nu utilizați produsul și contactați furnizorul pentru asistență.

1. DESCRIERE GENERALĂ

Cadrelle de mers cu roți, cunoscute și sub numele de rolatoare, sunt un dispozitiv care ajută persoanele cu un mers instabil sau cu dificultăți de mers să își schimbe poziția. Utilizarea acestora este recomandată pentru persoanele care se pot deplasa independent, care au nevoie doar de un ajutor minor pentru a obține o siguranță adecvată la mers și care pot acționa manetele de frână în mod independent. Este ideal în caz de slăbiciune fizică, stări de amețală sau pentru persoanele care trebuie să se odihnească, să se oprească sau să se așeze frecvent atunci când se deplasează pe distanțe mari. Acestea pot oferi un grad ridicat de stabilitate în timpul mersului și, deoarece pot fi frânate, pot contribui la prevenirea rănilor și a accidentelor cauzate de alunecare. Ideal pentru cei care suferă de durere, inflamație, reumatism sau alte afecțiuni musculo-scheletice cauzate de uzura articulațiilor la nivelul membrelor inferioare. De asemenea, poate fi recomandată în cazul leziunilor membrelor inferioare cauzate de accidente sau boli. De asemenea, poate ajuta cu dificultăți de mers pe jos din cauza unei tulburări de dezvoltare la copii sau a paraliziei. În cazul protezelor ale membrelor inferioare, în timpul perioadei de recuperare postoperatorie în cazul fracturilor de șold, mersul devine dificil și necesită asistență. Poate oferi o soluție imediată în cazul unei slăbiciuni fizice, a unui dezechilibru sau a unor probleme de coordonare a mișcării.


Indicații: Pentru tratamentul durerilor articulare ale membrelor inferioare, inflamații, malformații, paralizii sau slăbiciunea persoanelor vârstnice, tratamentul postoperator sau conservator al leziunilor membrelor inferioare, faza postoperatorie a amputațiilor și protezelor membrelor inferioare, pentru tulburări de echilibru.

Domeniul medicilor autorizați pentru prescripție: traumatologie ortopedică, ortopedie, reabilitare medicală (medicină infantilă și pediatrică), medicină fizică și medicină de reabilitare, reumatologie, chirurgie, chirurgie vasculară, chirurgie pediatrică, neurologie, neurologie pediatrică, neurochirurgie, geriatrie, în caz de comandă repetată și medicul de familie al pacientului.

2. PARAMETRI TEHNICI

- Dimensiune: lungime 68 cm * lățime 66 cm * înălțime 81-93,5 cm
- Potrivit atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior, este un ajutor excelent pentru mersul pe jos în afara casei, cu prisme și dungi reflectorizante pe roți și pe geanta de cumpărături, astfel încât poate fi utilizat pe întuneric
- 4 roți mari și solide, roțile din față și din spate au un diametru de 20 cm
- Echipat cu așa-numite roți pivotante frontale pentru o întoarcere mai ușoară

- Cântărește doar 8,1 kg
- Capacitate maximă de încărcare de până la 136 kg
- Pliabil, ușor de manevrat și ușor de transportat datorită designului său cu cadru încrucișat
- Designul și tratamentul suprafețelor fac ca produsul să fie ușor de curățat.
- Dimensiune ambalaj: lungime 63.5 cm * lățime 33 cm * înălțime 34 cm

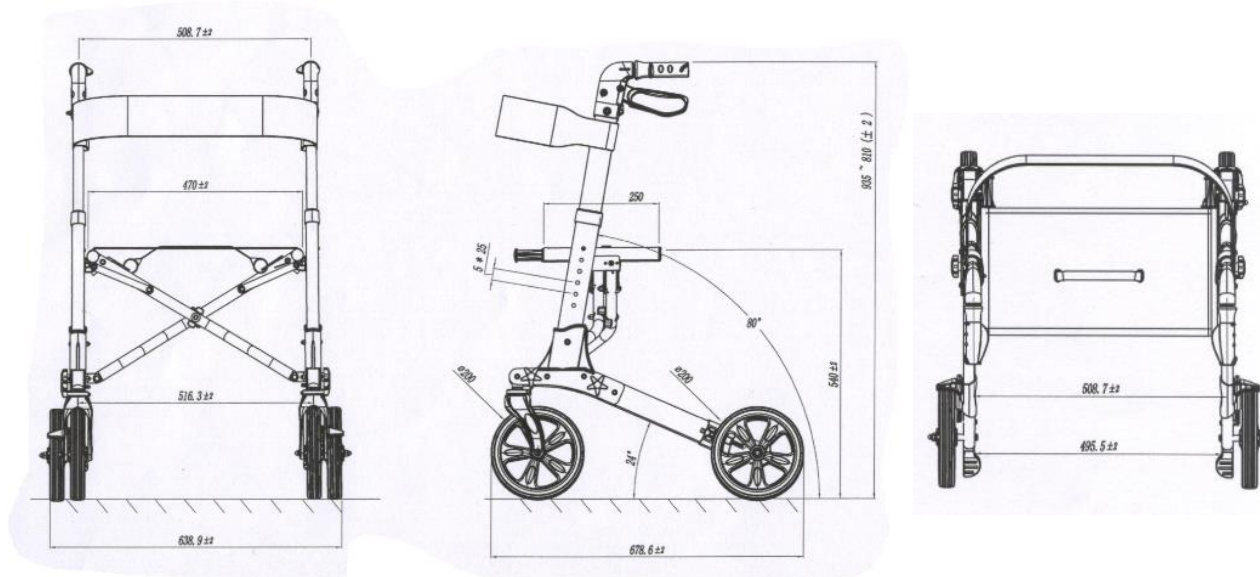

3. LISTA PIESELOR ROLATORULUI

1. Mâner: cu un suport pentru palmă ergonomic din cauciuc moale și butoane de susținere a degetelor pentru o prindere confortabilă, înălțime reglabilă pe 6 niveluri, de la 81 la 93,5 cm
2. Manetă de frână: frânare de mână ușor de utilizat, echipată cu mecanism de blocare, astfel încât să poată fi fixată pentru a fi așezată, fabricată din plastic negru, utilizată pentru a încetini și a bloca rolatorul, maneta de frână largă, nu taie degetele atunci când este utilizată, forța de frânare este reglabilă și bine distribuită
3. Butoanele mecanismului de pliere a roții din față: plierea roții din față pentru a plia
4. Spătar: cu spătar lenticular din nylon ușor de curățat, negru, ușor rigidizat și căptușit, oferă un suport bun.
5. Scaun din plasă: plasă de nylon negru ușor de curățat, suprafață de șezut și spătar puternic pentru confort și relaxare maximă, dimensiune extra largă (66 cm) potrivită pentru pacienții cu greutate mare cu solduri largi, înălțimea scaunului 55 cm
6. Geantă de cumpărături: ușor de păstrat curată, confecționată din material lenticular de nylon, poate fi așezată în față, capacitate de 25 de litri, poate fi încărcată până la 30 kg, poate fi folosită pentru cumpărături, cu bandă reflectorizantă
7. Butoane pentru mecanismul de pliere a roților din spate

8. Roata din față: direcționarea ușoară și stabilă a dispozitivului cu ajutorul unei furci pivotante, roata din față din PVC+ PP cu diametrul de 20 cm, cu prisme reflectorizante.
9. Roata din spate: roata din spate din PVC + PP cu diametru de 20 cm
10. Suport pentru baston de mers pe jos: plastic negru, pentru transportul bastonului de mers pe jos sau a cârjelor
11. Cadru: sudat, aliaj de aluminiu suficient de gros, pliabil, acoperit cu pulbere argintie, plăcut din punct de vedere estetic, ușor de asamblat și stabil la fixare
12. Bară transversală: aluminiu, cruce simplă, acoperită cu pulbere neagră, care permite pliarea cadrului.

4. GHID DE ASAMBLARE

Deschiderea rolatorului

1. Desfaceți celcro-ul și scoateți butoanele mecanismului de pliere a roților din spate. (Figura 1)



Figura 1



Figura 2

2. Întoarceți brațul roții din spate înapoi. (Figura 2.)
3. Introduceți și strângeți butoanele de pe mecanismul de pliere a roților din spate pentru a asigura o potrivire corectă.
4. Îndepărtați butoanele mecanismului de pliere a roților din față. (Figura 1)
5. Întoarceți brațul roții din față spre înainte. (Figura 3)



Figura 3

6. Introduceți și strângeți butoanele de pe mecanismul de pliere a roților din față pentru a asigura o potrivire corectă.
7. Îndepărtați cele două mânere.
8. Deschideți cadrul până când mecanismul de blocare a barei încrucișate se blochează automat, apăsând în jos pe ambele margini pentru a verifica dacă scaunul este bine fixat. (Figura 4)



Figura 4

⚠️ Asigurați-vă că mecanismul de blocare a barei încrucișate și mecanismul de pliere a roții spate sunt bine fixate înainte de uti



Figura 5

Plierea rolatorului

Îndepărtați accesoriile și coborâți mânerul, dacă este necesar. Ridicați curea de eliberare de pe scaunul de plasă al mecanismului de blocare încrucișată pentru a deschide dispozitivul de blocare încrucișată. Închideți cadrul așa cum se arată în stânga (Figura 5). Strângeți cele două mânere. Eliberați butoanele de pe mecanismul de pliere a roților din față și din spate și rotiți brațul roții din spate spre interior, puneți la loc butoanele de pe mecanismul de pliere și închideți velcro-ul de pe picioarele din spate.



Figure 6

Montarea geții de cumpărături

Atașați geanta la cârligul cadrului scaunului. Geanta de cumpărături poate fi detașată cu ușurință în timpul utilizării. (Figura 6)

Reglarea frânei

Sistemul de frânare al rolatorului dumneavoastră trebuie reglat periodic.

Pentru a regla frânele, slăbiți piulița B (Nut B), apoi înșurubați piulița A (Nut A). După ajustare, strângeți din nou piulița B. Dacă este necesară o reglare suplimentară, slăbiți șurubul de blocare și apoi, cu ajutorul unui clește, trageți cablul (Cabel) în jos cu aproximativ un milimetru. Strângeți șurubul de blocare. Frânele pot fi apoi reglate în continuare prin slăbirea piuliței B și rotirea piuliței A (Figura 9).

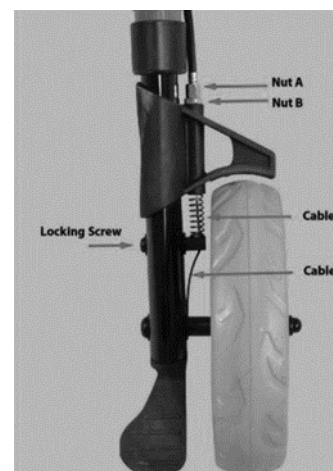


Figura 9



Aționarea frânelor

1. Pentru a opri, apăsați ușor pe ambele frâne în același timp, ceea ce va încetini și va opri rolatorul.
2. Frânele de pe rollator au o opțiune de blocare (Figura 10). Pentru a utiliza această opțiune, apăsați simultan ambele frâne. Veți simți un mic clic al frânei. Frânele se află atunci în poziția „blocat”.
3. Pentru a o elibera, pur și simplu acționați din nou frânele și veți auzi un mic clic în timp ce „parcarea” este eliberată.



Figura 10



Figura 11


Reglarea înălțimii mânerelor pentru diferiți utilizatori

Apăsați butoanele de pe mânere și trageți mânerul în sus sau în jos. De îndată ce mânerul se mișcă, eliberați butoanele. Astfel, se stabilește automat următoarea înălțime posibilă. Repetați această operațiune până când ajungeți la înălțimea dorită. (Figura 11)


5. CURĂȚAREA PRODUSULUI

Poate fi curățat cu un dezinfectant de uz casnic. Poate fi curățat cu detergenți neutri, dezinfectanți și non-agresivi utilizați în gospodării. După spălare, clătiți cu apă curată și ștergeți cu o cârpă uscată! Nu folosiți în niciun caz detergenți abrazivi sau solvenți, deoarece aceștia ar putea deteriora grav rolatorul și invalida garanția.


6. UTILIZARE

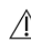 Utilizați rolatorul numai pe suprafețe plane, de exemplu: trotuare sau în casă. Nu utilizați pe teren denivelat sau pe suprafețe cu gropi.

Utilizarea unui rolator pe aceste suprafețe vă poate compromite grav siguranța și poate, de asemenea, deteriora rolatorul iremediabil.

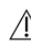
 Utilizați produsul numai în scopul pentru care a fost conceput, și anume pentru a vă ajuta să mergeți, deci nu-l utilizați niciodată în alte scopuri, de exemplu, nu utilizați produsul ca scară și nu stați pe el.

Atunci când nu este utilizat, pliați pur și simplu rolatorul și depozitați-l până când aveți nevoie de el din nou.

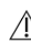 Nu lăsați copiii să se joace cu el. De asemenea, producătorul nu este răspunzător pentru pericolele sau daunele care pot apărea în cazul copiilor nesupravegheați în timpul utilizării produsului.


7. ÎNTREȚINERE

Verificați dacă toate roțile și mecanismul de pliere funcționează corect și dacă toate roțile se mișcă liber. Trebuie să se acorde o atenție deosebită roților din față, asigurându-se că acestea se rotesc liber și fără obstacole și că sunt bine fixate de cadru.

 Nu utilizați rolatorul dacă vreuna dintre roți este greu de rotit sau nu pare să fie fixată corespunzător de cadru sau dacă suspectați că este deteriorată sau prezintă orice alt defect.

Verificați în mod regulat rolatorul: inspectați-l vizual zilnic înainte de utilizare pentru a vă asigura că elementele de fixare sunt strânse. În fiecare lună, verificați dacă toate știfturile de fixare sunt bine fixate. Verificați dacă nu există piese slăbite. Verificați reglarea frânelor și roțile. De asemenea, vă recomandăm să efectuați revizia rolatorului dumneavoastră la fiecare 3 luni.

Verificați cu atenție starea componentelor dispozitivului. Dacă una dintre acestea pare a fi defectă și aparatul este defect, nu utilizați aparatul până când nu a fost înlocuit cu o piesă originală. Contactați producătorul pentru service.

 Nu folosiți piese sau accesorii ale altor companii cu Rolatorul GM 4260. În acest caz, garanția va fi invalidată și vă poate compromite grav siguranța. Geanta este, de asemenea, special concepută pentru rolatorul GM 4260. Nu utilizați sau combinați cu genți și/sau coșuri de la alți producători.

8. COD DE BARE



9. PRODUCĂTOR ȘI DISTRIBUITOR

Vă rugăm să rețineți că evenimentele neașteptate cu dispozitivul trebuie raportate producătorului și autorității competente a utilizatorului și / sau a statului membru de stabilire a pacientului. Autoritatea competentă din România: ANMDM – Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor medicale din România.



Producător și distribuitor:

Patella-96 Kft.

HU-2045 Törökbálint

Kisfaludy u 49-1.

Tel.: +36 1 248 5300

info@patellamedical.hu

www.gyogybolt.hu

www.gmed.hu

www.epapucs.hu



Distribuitor:

SC Vital Logistic Srl.

RO-540210 Tirgu Mures

str Gheorghe Doja nr 177

Corp C1-C2 Parter

comenzi@vital-logistic.ro

Tel.: +40 265 265 268

www.vital-logistic.ro

10. GARANȚIE

Vă rugăm să păstrați cu atenție acest prospect, care servește drept titlu de garanție, deoarece orice defecte pot fi remediate numai la prezentarea acestuia. Înlocuirea titlului de garanție este posibilă numai prin prezentarea facturii originale. Întreținerea și curățarea periodică a dispozitivului este responsabilitatea proprietarului. Numai dispozitivele curățate vor fi acceptate pentru reparații. Garanția nu acoperă deteriorarea care nu se datorează unor defecte de fabricație și uzura pieselor din plastic (elementul de șezut și picioare din cauciuc)

CERTIFICAT DE GARANȚIE

014-104 Rev 0

TERMEN DE GARANȚIE : 12 luni

PRODUS: SERIA:

FACTURA/BON: DIN DATA:

CUMPĂRĂTOR:

ADRESA:.....

Prezentul certificat de garanție a fost întocmit în baza legii 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora.

Garanția produselor este de 12 luni de la data cumpărării, perioadă în care consumatorul beneficiază de repararea sau înlocuirea gratuită a produsului, în cazul în care se constată un defect de fabricație. La cumpărarea produsului consumatorul are obligația să verifice completarea certificatului de garanție cu toate datele necesare, semnarea și stampilarea de către vânzător. Termenul de soluționare a reclamațiilor este de 15 de zile.

În cazul defectării produsului, cumpărătorul îl va duce la magazinul de unde l-a cumpărat, solicitând repararea sau înlocuirea acestuia.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este însoțit de certificatul de garanție, bonul fiscal și cutia cu care a fost cumpărat, completate corespunzător, lizibile, fără modificări, semnate și stampilate. Nu se acordă garanție amortizoarelor de cauciuc (consumabile).

Durata termenului de garanție se prelungește cu timpul scurs de la data la care cumpărătorul a reclamat defectarea produsului și până la repunerea acestuia în funcțiune.

Cumpărătorul își pierde dreptul la garanție dacă: produsul a fost transportat, depozitat manipulat sau utilizat necorespunzător, dacă a fost modificat, a suferit intervenții neautorizate sau a fost utilizat fără respectarea instrucțiunilor.

Prin semnarea acestui certificat cumpărătorul își exprimă acordul cu cele cuprinse în acest act și declară că a preluat produsul în bună stare, precum și actele necesare: bonul fiscal și certificatul de garanție.

Durata medie de utilizare a produsului este de 12 de luni.

Denumire vanzator.....

Adresa vanzator

Tel.vanzator.....

Semnătura și
ștampila vânzătorului

.....

Semnătura și
ștampila importatorului

.....

Semnătura
cumpărătorului

.....

