

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GM 4021/G GÖRDÜLŐ SZOBAI WC



Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi kérdések esetére. A jelen leírás az eszköz használati utasításait tartalmazza.

1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS



A betegápolás egyik legfontosabb mozzanata, hogy a betegek megfelelő körülmények között tudják elvégezni alapvető fiziológiai szükségleteiket. Egy nehezen mozgó ember mindennapi teendőinek elvégzése megterhelő lehet megfelelő segédeszközök hiányában. A szobai WC alkalmas lehet a házi betegápolás megkönnyítésére, vagy kiválóan alkalmazható kórházakban, szociális és egyéb ápolási intézményekben. Minden olyan esetben javasolt lehet használata, amikor egy fizikailag nagyon gyenge, vagy mozgáskorlátozott személy az önellátásra képtelen, így a mellékhelyiséget nem tudja megközelíteni. A fedőlap használatával szobai székként, ülőkéként is használható. A gördíthető szobai WC alkalmas lehet a betegek kisebb helyváltoztatásának elősegítésére, így használható azokban az esetekben is, amikor a beteg számára a vízóblítás WC ülőke magassága túl alacsony, így a felállás, illetve a leülés nehézséget okoz. A gyűjtő edényt eltávolítva a szobai WC a beépített WC fölé helyezve is használható.

2. SZAKKÉPESÍTÉSI-KÖVETELMÉNY

Ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, gyermeksebészet, sebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat), neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, geriátria, reumatológia, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is.

3. INDIKÁCIÓ

Önellátásra tartósan képtelen mozgáskorlátozott betegek részére.

4. MŰSZAKI ADATOK

- A toalettészék vázszerkezete hajlított acélcső, amely hegesztési eljárással készült
- A váz felülete porszórással van festve, a felhasznált kötőelemek galvanizáltak
- Elérhető bordó, szürke és kék színekben
- Műanyag dugó zárja le a csővégeket
- Az ülőke takaró vízhatlan műbőrrel kárpitozott
- A műanyag ülőke nyílása alá hátulról műanyag kör alakú gyűjtőedény csúsztatható
- Az üléstakaró és a vödör eltávolítása után beépített WC fölé is helyezhető
- A kartámasz és a háttámla szivaccsal párnázott
- A szék váza összecsukható, az üléstakaró, ülőke és háttámla eltávolítása után
- Összecsukott állapotban kb. 19 cm széles
- A könnyebb ki-és beszállás érdekében a lábtartók kihajthatóak, a talptámaszok felhajthatóak valamint a kartámasz kivethető
- 4 db tömör PVC kerékkal felszerelt, a két hátsó kerék rögzítő fékkel ellátott
- Csomagolás mérete: 60*55*25 cm

Szélesség	Hossz	Magasság	Beülő mélység	Maximális terhelhetőség	Saját tömeg	Háttámla magassága	Ülés magasság
53 cm	90 cm	92 cm	43 cm	100 kg	13 kg	43 cm	52 cm

5. HASZNÁLAT

Az ülőke alatt műanyagból készült gyűjtőedény található a vizelet és a széklet gyűjtésére. A toalettészék ülőketakarója eltávolítása után használható a gyűjtőedény. A műanyag vödör az ülés alatti sínbe hátulról tolható be, illetve húzható ki. Használat esetén ajánlott a műanyag gyűjtőedényt vízzel feltölteni.

A gördíthető szobai WC-szék csak függőlegesen terhelhető!

A szobai WC kizárólag beltéri használatra ajánlott. Nem használható a beteg tusolására, fürdetésére. Mielőtt a beteget a székbe ültetné, ellenőrizni kell, hogy le van-e megfelelően fékezve a szék. A szobai WC nem alkalmas beteghordásra és nem használható kerekesszékként.

A használati útmutatótól eltérő használatból, túlterhelésből, átalakításból és helytelen kezeléssel eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget, így a jótállás nem érvényesíthető!

6. TISZTÍTÁS

Fertőtlenítő hatású háztartási tisztítószerrel tisztítható használat után. Mosás után bő vízzel öblítse le, és száraz ruhával törölje át!

Feltétlenül fontos higiéniai szempontból, hogy a wc-széket, és a hozzá tartozó edényt minden használat után alaposan meg kell tisztítani, hogy további használatra higiénikus és alkalmas legyen! Javasolt a műanyag gyűjtőedény rendszeres fertőtlenítése is!

7. KARBANTARTÁS

A termék karbantartást nem igényel, időszakosan érdemes ellenőrizni az alkatrészeket.

GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ



Gyártó és forgalmazó:
Patella-96 Kft.
H-2045 Törökbálint
Kisfaludy u 49-1.
Tel.: +36 1 248 5300
info@patellamedical.hu
www.gyogybolt.hu
www.gmed.hu
www.epapucs.hu



Distribútor:
SC Vital Logistic Srl.
540210 Tirgu Mures
str Gheorghe Doja nr 177
Corp C1-C2 Parter, Romania
comenzi@vital-logistic.ro
Tel.: +40 265 265 268
www.vital-logistic.ro

9. VONALKÓD

