

Mechanikus Betegágy

MG-2000

Felhasználói kézikönyv



Leírás:

A betegágyat ágyat azoknak tervezték, akiket egészségügyi problémák miatt különböző helyszíneken kezelnek. Amint azt a Bizottság 43/92 irányelve előírja, a kórházi ágyat I. osztályú orvosi eszköznek kell tekinteni. A gyártó javasolja a rendszeres tisztítást és karbantartást a hosszabb élettartam biztosítása érdekében.

Ágykeret

Rácsos ágykeret

Az acélső szerkezete alátámasztja a mozgó részeket, mint például a fejtámla és a lábtámla. A hát és térd szakaszok fő funkciói a fel/le. A keret segítségével a fejtámlát és a lábtámlát a falemezekkel össze lehet szerelni.

Fej- és lábtámla

Acélszerkezet, kerethez rögzítve, fából készült panellel az ágykeret és az ágytartozékok (oldalsínek) alátámasztására.

Háttámla rész

A rácsos keret mozgó része. A Háttámla rész fel/le funkciókkal van ellátva.

Térd szakasz

Mozgó rész. A Térd szakasz fel/le funkciókkal van ellátva.

Hajtókar

Az ágy tartozéka a fej és a térd különböző szögeinek beállításához.


Ágy összeszerelése

Csomagolja ki és ellenőrizze a következő elemek meglétét:

- Rácsos keret
- Festett fejtámla és lábtámla
- Fából készült panelek
- Hajtókar vagy motor

Helyezze a rácsot a földre. A padló sérülésének elkerülése érdekében helyezzen kartont a padlóra. Emelje fel az egyik oldalát, és rögzítse a háló kampóját a fej/lábtámlák megfelelő helyzetébe. (Amint az ábrán látható)

Ismételje meg a műveletet a másik oldalon

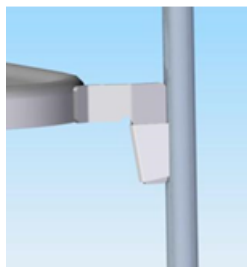


Helyezze a falemezeket a fej/lábtámlákba.

Hajtókar beszerelése

Helyezze be a támasztócsövet (1) a nagyobb csövekbe (2) a fej és a térd szakaszához, összeszerelve sasszeggel (1), rögzítse a szeget.

Helyezze a forgattyútestet (3) a tartóba (4), majd csavarja be a csavarokat (5).

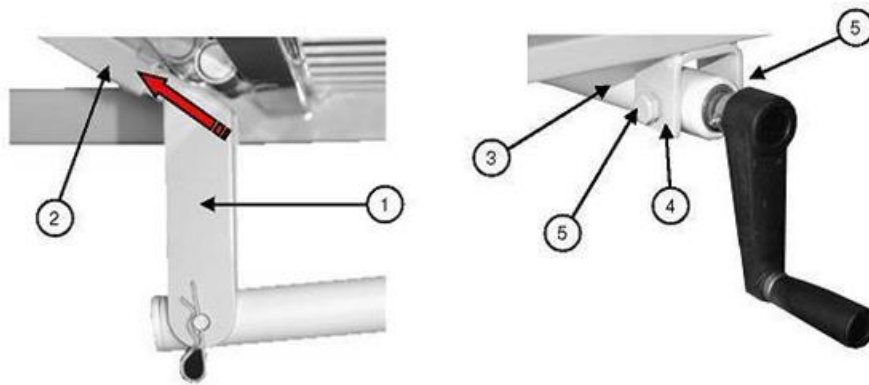

Kézi beállítás

Az egykaros és a duplakaros ágyak úgy vannak kialakítva, hogy a fej- és lábtartókat a hajtókar eltekerésével tudják beállítani.



Fejrész beállítása

A bal oldali hajtókar a láb magasságának beállítására szolgál. Emeléshez forgassa el a hajtókart az óramutató járásával megegyezően, a keret címkéjén jelzettek szerint, amíg el nem éri a kívánt magasságot. A leengedéshez fordítsa el az óramutató járásával ellenkező irányba.



Mindkét hajtókar a hosszútávú használat érdekében minőségileg kialakított.

A görgők beállítása

A görgős fék használata során az ágy minden mozgását megakadályozza.

A biztonságos rögzítés érdekében nyomja meg a kart a lábával, hogy megfékezze mind

a négy görgőt az alábbi ábra szerint.



Lezárva



Feloldva

Biztonság

- Ne lépje túl a műszaki adatokban feltüntetett teherbírást és dőlést!
- Az ágy mozgatása közben ügyeljen arra, hogy senki ne tegye be a kezét vagy más testrészeit az ágy réseibe. (Fennáll a sérülés veszélye!)
- Ügyeljen arra, hogy az ágyat vízszintes felületen használja és ne legyenek akadályok a környezetében.
- Ne távolítsa el az ágyon található címkéket vagy matricákat!
- Gondoskodjon arról, hogy minden érintett személy tisztában legyen a betegágyra vonatkozó rendelkezésekkel (a biztonságos működtetéssel és kezeléssel).
- Győződjön meg arról, hogy a felhasználók rendelkeznek-e a felhasználói kézikönyvvel.
- Ne használja a mozgó részeket engedély nélkül, például ne oldja ki őket.
- Karbantartás közben viseljen megfelelő védőfelszerelést, például kesztyűt.
- Kerülje bármilyen eszköz, kiegészítő használatát, amelyek beakadhatnak a mozgó részekbe.
- Görgős ágyaknál ügyeljen arra, hogy minden görgő rögzítve legyen. A görgőket abban az esetben oldja fel, ha az ágyat szeretné áthelyezni, áthelyezés után rögzítse azokat.

Figyelem

Az ágy csak rendeltetésszerűen használható. Ne használja az ágyat más célokra vagy olyan környezeti feltételek mellett, amelyeket a felhasználói kézikönyv nem határoz meg: Ezeknek a feltételeknek a figyelmen kívül hagyása a mechanikus eszköz súlyos károsodásához vezethet, és a garancia érvényét veszti.

Környezeti feltételek

Az ágyat teljesen száraz környezetben kell elhelyezni (páratartalom 10% és 90% között, páralecsapódás nélkül). A hőmérséklet 10°C és 50°C között legyen. Megengedhető, hogy száraz környezetben -10°C és 70°C közötti hőmérsékleten tárolja. Kérjük, figyelmesen tartsa be a tárolási szabályokat!

Kockázat

Bár az ágykeret kialakítása összhangban van a jelenlegi előírásokkal, vannak olyan

kockázatok, amelyeket nem lehet kiküszöbölni, például a felső és az alsó végtagok mozgatható részekbe való beakadása; a kezelés során rendkívül óvatosan kell eljárni, hogy elkerülje a végtagok vagy tárgyak sérülését.

Rendeltetésszerű használat

Felnőttek használhatják, 40 kg testtömeg és 146 cm magasság felett. Maximális terhelhetőség: 135 kg. Használata javasolt szanatóriumokban, időskorúak rehabilitációs központjaiban, valamint családi környezetben. Az ágyakat olyan emberek számára tervezték, akik egészségügyi problémákkal küzdenek. Tilos a súlyos csontsérülés, légzési elégtelenség és súlyos égési sérülések esetén történő alkalmazása! Ha kétségei vannak, forduljon orvosához!

Ellenőrzés

A kórházi ágy kevés karbantartást igényel.

Az ágy tartóssága és az Ön biztonsága érdekében a következő időszakos ellenőrzéseket kell elvégezni:

- **Heti rendszerességgel:**

Vizsgálja meg a hajtókar működését!

A két hajtókaral ellátott ágy esetén ellenőrizze a láb- és a hátemelő funkciót a két hajtókar segítségével.

- **Havi:**

Olajozza meg a hajtókar csavarjait az oldalfuratokon keresztül.

Görgős ágyak esetén ellenőrizze a görgők épségét. Ha a görgők fékezett állapotban vannak az ágy semmilyen irányba nem mozgatható.

Minden ellenőrzésnél olajozza meg a forgó alkatrészeket. (hajtókarok, csapágyak és mozgó pontok)

Karbantartás

- **Hajtókar tengely karbantartása és cseréje**

Az ellenőrzés során az ágy meghatározott karbantartására van szükség. Ha a hajtókart cserélik, helyezze az ágyat nyugalmi helyzetbe (a fej- és a lábtámla alappozícióban, vízszintesen). Ezután távolítsa el az ágy rögzítőcsavarjait. Cserélje ki egy új hajtókarra. Különösen figyeljen, hogy a hajtókar az ágy fej- vagy lábvégét emeli-e meg!

Fa panelek cseréje

Panel csere esetén csúsztassa felfelé a panelt, amíg ki nem válik a támlából, és helyezze be az új panelt.

Segítség

Ha valamilyen probléma lép fel kérjük, forduljon a kereskedőhöz, vagy a Patellához.

Az ágyat vagy tartozékait nem szabad megváltoztatni.

Kérjük, csak eredeti alkatrészeket használjon, amelyeket közvetlenül a gyártó biztosít!

Műszaki adatok

	MG-2000
Össztömeg	31,1 kg
Biztonsági terhelés	300lbs
Nettó magasság	45 cm
Teljes hossz	205 cm

A maximum biztonságos terhelési kapacitás 138kg, ami körülbelül 1380N

Maximális beteg súly: 135 kg

Hangszint < 45dB

Ártalmatlanítás

Az ágy festett vagy horganyzott acéllemezéből, műanyagból és nemes fából készül. Ha ártalmatlanításra van szükség, szerelje szét az alkatrészeket az anyag típusa szerint és a hatályos előírások szerint ártalmatlanítsa.

Tisztítás

Az ágy tisztításához ne használjon maró hatású tisztítószeret! Nedves ruhával törölje le az érintett részeket, és azonnal szárítsa meg. A kórházak vagy szanatóriumok falai fertőtlenítése során, használjon olyan ismert korrózió szintű tisztítószereket, amik nem károsítják az ágyat.

Kérjük, kövesse a termék felhasználói kézikönyvét a koncentráció, a hőmérséklet és a reakcióidő tekintetében. Semmilyen esetben ne használjon kénsavat vagy szerves savat!

A biztonságos használathoz, kérjük olvassa el a felhasználói kézikönyvet!

Modellszám: MG-2000

Elérhetőség:



Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10, le Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.

Tel: +31645171879, +31626669008

Email: peter@lotusnl.com



Gyártó:

ZhongShan JunCheng,

Medical Technology Co.,

Ltd No.6 AnZhao Street

ZhenNan Road,

XiaoLan Town ZhongShan city GuangDong 528414



6975740132004



Importőr:

Patella – 96 Kft.

2045 Törökbálint, Kisfaludy u.

49 – 1.

www.gyogybolt.hu

www.epapucs.hu

www.patellamedical.hu

info@patellamedical.hu

Tel: 06-1-248-5300



Distributor:

SC Vital Logistic Srl.

540210 Tirgu Mures

str Gheorghe Doja nr 177

Corp C1-C2 Parter

Romania

www.vital-logistic.ro

comenzi@vital-logistic.ro

Tel: 0265-265-268