

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

GM BETEGALÁTÉT

 Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi kérdések esetére. A jelen leírás az eszköz használati utasításait tartalmazza.

Termékek:

- GM egyszerhasználatos antidecubitus alátét 80x170
- GM egyszerhasználatos antidecubitus alátét 80g 60x90
- GM egyszerhasználatos antidecubitus alátét 60g 60x90
- GM egyszerhasználatos antidecubitus alátét 60x60
- GM egyszerhasználatos antidecubitus alátét 60x40

A betegalátét ágy, szék, kerekesszék vagy egyéb fekvő-, illetve ülőfelület védelmére szolgál nedvesség és szennyeződés ellen. Inkontinencia vagy bármely váladékozással járó állapot esetén ajánlott.

Használat:

1. Vegye ki a terméket a csomagolásból, majd hajtsa ki teljes méretére.
2. Ágyon történő használat esetén helyezze az alátétet a fehér oldalával felfelé úgy, hogy a fenék és a medence területe a nedvszívó rész közepére essen.
3. Széken vagy kerekesszéken történő használat esetén helyezze az alátétet a fehér oldalával felfelé az ülőfelületre úgy, hogy a felhasználó fenéke a betegalátét közepén helyezkedjen el.
4. Szennyeződés vagy átnedvesedés esetén az alátétet cserélje ki.
5. Használat után dobja ki a terméket!
6. A termék csomagolását a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe dobja!

Száraz, hűvös helyen tárolandó. Közvetlen napfénytől és nedvességtől óvja. Gyermekektől elzárva tartandó. Kizárólag külsőleges használatra! Nem steril termék!



GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ

Patella-96 Kft.
HU-2045 Törökbálint
Kisfaludy u 49-1.
reklamacio@patellamedical.hu
www.gmed.hu
www.epapucs.hu

Ha a termék használata során bármilyen rendellenességet vagy súlyos eseményt észlel, kérjük, haladéktalanul jelezze a gyártónak.

