



 **patella**

GMed **LADY FEET** **SAROKÉK**



100% szilikon



Méret

● S ● M ● L

Tartalma: 1 pár

Minőség és technológia az Ön egészségéért!



LADY FEET SAROKÉK

100% szilikon



Hozzájárul a kényelem megteremtéséhez. A sarkon lévő csontnyúlvány, csonttritkulás, Achilles íngyulladás, Achilles-bursa gyulladás, saroktáji fájdalom, lábközépi fájdalom, talpi fascia gyulladás, zúzódás és rándulás esetén alkalmazható. Elősegíti az ütődések elnyelését minden lépéskor. A puha szilikonból készült rózsaszín pont sűrűsége és merevsége alkalmas a sarokra ható nyomás csökkentésében. Az oldalsó szárnyak a sarokhoz illeszkednek, így megfelelő anatómiai illeszkedést biztosítanak a sarok hátsó részétől kezdődően. Nagy érintkezési területet lefedve, fokozott hatékonyságot biztosítva a sarok rendellenességeinek kezelésében és megelőzésében.

HASZNÁLATA: Helyezze a cipő belsejébe a sarok részre

ELŐVIGYÁZATOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK: A sarokék ne érintkezzen nyílt sebbel. Esetleges elváltozás, bőrreakció előfordulása esetén ne használja a sarokéket, forduljon orvosához! Amennyiben a termék már nem alkalmas (pl. megsérült) rendeltetésszerű használatra, hagyjon fel annak alkalmazásával.

TISZTÍTÁS: Meleg, vagy hideg vízben mosható szappannal, vagy mosószerrel. Maximum 50°C-on szárítsa! Ne érintkezzen szennyező anyagokkal. Használatához nincs szükség hintőporra.

TÁROLÁS: Száraz, hűvös helyen tárolja az eredeti csomagolásában. A termék hatékonysága függ a megfelelő méret kiválasztásától és használatától! Éles eszközöktől távol tartandó!

ELÉRHETŐ MÉRETEK: S, M, L

 **patella**



Patella-96 Kft.

2045 Törökbálint, Kísfaludy u. 49 – 1.

www.gmed.hu

www.gyogybolt.hu

www.epapucs.hu

info@patellamedical.hu

Tel.: +36-1-248-5300

