



 GMed **BENŐTT**
LÁBUJJKÖRÖM VÉDŐ
Polimer Gél



Védi a benőtt lábujjkörömöt
a külső szennyeződésektől.

Méret

● S ● M ● L

Tartalma: 1 db

Minőség és technológia az Ön egészségéért!



BENÓTT LÁBUJJKÖRÖM VÉDŐ

Polimer Gél

Alkalmas arra, hogy megvédje a benőtt lábujjkörömöt a szennyeződésektől és csillapítsa a benőtt, sérült lábujjkörömök fájdalmát, valamint használható tyúkszem, kalapácsujj esetén a lábujjak védelmére. A polimer gél réteg megfelelő arra, hogy csillapítsa a fájdalmat, miközben védi az érintett területet a cipő által okozott hatásokkal és dörzsöléssel szemben.

HASZNÁLATA: Húzza rá a sérült lábujjára.

ELŐVIGYÁZATOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK: A termék ne érintkezzen nyílt sebbel. Esetleges elváltozás, bőrreakció előfordulása esetén ne használja a terméket, forduljon orvosához! Amennyiben a termék már nem alkalmas (pl. megsérült) rendeltetésszerű használatra, hagyjon fel annak alkalmazásával.

TISZTÍTÁS: Mossa ki hideg vízben és szárítsa árnyékos helyen! Ne érintkezzen szennyező anyagokkal. Használatához javasoljuk hintőpor használatát.

TÁROLÁS: Száraz, hűvös helyen tárolja az eredeti csomagolásában.

ÖSSZETÉTEL: Polimer gél (100% TPE) és ásványi olaj (USP)

A termék hatékonysága függ a megfelelő méret kiválasztásától és használatától! Éles eszközöktől távol tartandó!

ELÉRHETŐ MÉRETEK: S, M, L

 **patella**



Patella-96 Kft.

2045 Törökbálint, Kisfaludy u. 49 – 1.

www.gmed.hu

www.gyogybolt.hu

www.epapucs.hu

info@patellamedical.hu

Tel.: +36-1-248-5300

