

124mm

380mm

AZ ELEKTROMÁGNESES ÖSSZEFÉRHETŐSÉGRŐL SZÓLÓ INFORMÁCIÓK – ELEKTROMÁGNESES EMISSZIÓ		
A készülék az alább megadott elektromágneses környezetben történő használatra készült. A készülék megrendelője vagy felhasználója köteles biztosítani, hogy a készüléket valóban ilyen környezetben üzemeltessék.		
Emissziós teszt	Megfelelőség	
Nem releváns	Nem releváns	
CISPR 11 Sugárzott emisszió	1. csoport B osztály	
Harmonikus emissziók IEC 61000-3-2	Nem releváns	
Feszültségingadozások/ vibráló emissziók IEC 61000-3-3	Nem releváns	
AZ ELEKTROMÁGNESES ÖSSZEFÉRHETŐSÉGRŐL SZÓLÓ INFORMÁCIÓK – ELEKTROMÁGNESES ZAVARTŰRÉS		
A készülék az alább megadott elektromágneses környezetben történő használatra készült. A készülék megrendelője vagy felhasználója köteles biztosítani, hogy a készüléket valóban ilyen környezetben üzemeltessék.		
Zavartűrési vizsgálat	IEC 60601 tesztelési szint	Megfelelőségi szint
Elektrosztatikus kisülés (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV érintési ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV levegő	± 8 kV érintési ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV levegő
Elektrosztatikus tranziens folyamat / kisülés IEC 61000-4	± 2 kV a tápvezetésekre 100 kHz ismétlési frekvencia ±1 kV a bemenő/kimenő vezetésekre	N/A
Lökőfeszültség IEC 61000-4-5	± 0,5 kV, ± 1 kV differenciális üzemmód fázis – fázis	N/A
Feszültségesések, rövid áramszünetek és feszültségingadozások a tápvezetékben IEC 61000-4-11	0% U _T (100%-os U _T feszültségesés) 0,5 ciklusra 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, és 315°-nál 0% U _T (100%-os U _T feszültségesés) 1 ciklusra 0°-nál 70% U _T (30%-os U _T feszültségesés) 25/30 ciklusra 0°-nál 0% U _T (100%-os U _T feszültségesés) 250/300 ciklusra 0°-nál	N/A
Üzemi frekvencia (50/60 Hz) mágneses tér IEC 61000-4-8	30 A/m, 50/60 Hz	30 A/m, 50/60 Hz

MEGJEGYZÉS: Az U_T feszültség a hálózati váltakozó feszültség a teszt szint alkalmazása előtt.

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jótállás határideje a termék fogyasztó részére való átadásától vagy az üzembe helyezéstől (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el) számított 1, 2 vagy 3 év. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor az átadás napja lesz a jótállás kezdő időpontja. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:
- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó
- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérílmét.
- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítást igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A fogyasztó a választott jogáról másíkra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít cseréigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézí csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellek- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. Fogyasztói javgita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti. A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NCM rendelet (a továbbiakban: NCM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szervíz) a termék javításra való átvételekor az NCM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles. A vállalkozás a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállásról értelmében az egyéves kihordási idejű és bruttó 10.000 Ft feletti értékű eszközre, valamint annak tartozékaira és alkotórészeire és más, a rendelet hatály alá tartozó eszközre 12 hónap jótállást vállal. 2. § (1) értelmében 100.000 Ft-ot meghaladó, de 250.000 Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén két év, és 250.000 Ft eladási ár felett három év a vállalt jótállási idő. Jótállás nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészek (pl. világítótestek, akkumulátor kapacitás, gumiabroncsok, vedő-, takaróanyagok...) rendes elhasználódására, mindez elhasználódásra, mindez azonban nem érinti a fogyó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználataszerínti „hibás” volta esetén fennálló jótállási kötelezettséget. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákra a jótállás nem vonatkozik, amelynek feltételeit a használati útmutató tartalmazza. Jótállási igényét a kiszolgálás helyén érvényesítheti. A jótállási idő kezdete a kiszolgálás napja. Ha az eszközt javítják, annak jótállása meghosszabbodik azzal az idővel, amíg a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Reklamáció esetén az alábbi telefonszám hívható: +36-30-471-3237

JÓTÁLLÁSI JEGY

Kisállkozás neve és címe: Patella-96 Kft. 2045 Törökbalínt, Kislafudy u. 49-1.

Vállgálzó neve és címe:
Termék megnevezése: LÁZMÉRŐ DIGITÁLIS GMED DMT-4132
Termék gyártási száma (amennyiben van):
Gyártó neve és címe (amennyiben nem azonos a vállalkozással): JOYTECH Healthcare Co.,Ltd.No.365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, Hangzou City, 311100 Zhejiang, China
Vásárlás időpontja:
Termék vételára:
A termék fogyasztó részére való átadásának vagy (amennyiben azt a forgalmazó, illetve annak megbízottja végzi) az üzembe helyezés* időpontja: (*a megfelelő aláhúzandó)

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:
Javításra átvétel időpontja:
Hiba oka:
Javítás módja:
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:
A javítás-kijavítás időtartamával meghosszabbított -új határideje:

AZ ELEKTROMÁGNESES ÖSSZEFÉRHETŐSÉGRŐL SZÓLÓ INFORMÁCIÓK – ELEKTROMÁGNESES ZAVARTŰRÉS		
A készülék az alább megadott elektromágneses környezetben történő használatra készült. A készülék megrendelője vagy felhasználója köteles biztosítani, hogy a készüléket valóban ilyen környezetben üzemeltessék.		
Zavartűrésí vizsgálat	IEC 60601 tesztelésí szint	Megfelelőségí szint
Vezetett RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz - 80 MHz 6 Vrms 150 kHz - 80 MHz az ISM sávokon kívül	N/A
Sugárzott RF	10 V/m	10 V/m
IEC 61000-4-3	80 MHz - 2,7 GHz	
Közei mágneses mezők	30 kHz, 8 A/m, az óramutató járásával megegyező irányban 134,2 kHz, 65 A/m Impulzus moduláció 2,1 kHz 13,56 kHz, 7,5 A/m, Impulzus moduláció 50 kHz	30 kHz, 8 A/m, Óramutató járásával megegyező 134,2kHz, 65 A/m Impulzus moduláció 2,1 kHz 13,56 kHz, 7,5 A/m, Impulzus moduláció 50 kHz
IEC 61000-4-39		
1. MEGJEGYZÉS A 80 MHz és 800 MHz frekvencián a magasabb frekvenciatartománynak megfelelő elkülönítési távolságot kell figyelembe venni.		
2. MEGJEGYZÉS Az itt közölt útmutatások nem alkalmazhatók valamennyi helyzetre. Az elektromágneses továbbítást az abszorpció és a felületekről, tárgyakról, ill. emberekről történő visszatükrözódés is befolyásolja.		
a., Az ISM (ipari, tudományos és orvosi) sávok 0,15 MHz és 80 MHz között 6,765 MHz - 6,795 MHz; 13,553 MHz - 13,567 MHz; 26,957 MHz - 27,283 MHz és 40,66 MHz - 40,70 MHz. Az amatőr rádiózáshoz rendelkezésre álló sávok 0,15 MHz és 80 MHz között 1,8 MHz - 2,0 MHz, 3,5 MHz - 4,0 MHz, 5,3 MHz - 5,4 MHz, 7 MHz - 7,3 MHz, 10,1 MHz - 10,15 MHz, 14 MHz - 14,2 MHz, 18,07 MHz - 18,17 MHz, 21,0 MHz - 21,4 MHz, 24,89 MHz - 24,99 MHz, 28,0 MHz - 29,7 MHz és 50,0 MHz - 54,0 MHz.		
b., A megfelelőségí szintek szerepe a 150 kHz és 80 MHz közötti ISM frekvenciasávokban és a 80 MHz - 2,7 GHz frekvenciatartományban az, hogy csökkentse annak valószínűségét, hogy mobil/hordozható kommunikációs berendezések zavart okozhassanak, ha ilyen készülékek véletlenül a pácientstérbe kerülnek. Ebből kifolyólag ezekben a frekvenciatartományokban a jeladókra a javasolt elkülönítési távolság kiszámítására használt képletekbe egy további 10/3 tényezőt építettek be.		
c., A fix jeladók, mint a rádiótelefon (mobil/vezeték nélküli) és mobil rádió, amatőr rádió, AM és FM rádióműsor, ill. televízió sugárzás térejeit nem lehet elméleti úton pontosan megadni. A fix RF jeladók elektromágneses környezetének felméréséhez elektromágneses helyszíni felmérést kell végezni. Ha a mért térerősség a készülék üzemeltetési helyszíneén meghaladja az alkalmazható RF megfelelőségí szintet, a készülék normális működését ellenőrizni kell. Ha abnormális működést észlel, kiegészítő intézkedésekre lehet szükség, pl. a készülék áthelyezésére vagy elfordítására.		
d., A 150 kHz és 80 MHz közötti frekvenciatartományban a térerősség 3 V/m alatti legyen.		

JAVASOLT ELKÜLÖNÍTÉSI TÁVOLSÁGOK VEZETÉK NÉLKÜLI RF KOMMUNIKÁCIÓS BERENDEZÉSEK KÖZÖTT				
A készüléket olyan elektromágneses környezetben kell használni, ahol a zavaró RF jelek ellenőrzés alatt vannak. A készülék tulajdonosa vagy a felhasználó úgy akadályozhatja meg az elektromágneses interferenciát, hogy a vezeték nélküli RF kommunikációs berendezések között minimális távolságot tart az alábbi ajánlásnak megfelelően, a kommunikációs berendezés maximális kimeneti teljesítménye szerint.				
Frekvencia, MHz	Max. teljesítmény, W	Távolság	IEC 60601 tesztelésí szint	Megfelelőségí szint
385	1.8	0.3	27	27
450	2	0.3	28	28
710	0.2	0.3	9	9
745				
780				
810	2	0.3	28	28
870				
930				
1720	2	0.3	28	28
1845				
1970				
2450	2	0.3	28	28
5240				
5500				
5785	0.2	0.3	9	9
1. megjegyzés: Az itt közölt útmutatások nem alkalmazhatók valamennyi helyzetre. Az elektromágneses továbbítást az abszorpció és a felületekről, tárgyakról, ill. emberekről történő visszatükrözódés is befolyásolja.				

FIGYELMEZTETÉSEK

· Ezt a készüléket nem szabad elektronikus készülékek, pl. mobiltelefonok, adóvevők vagy rádiós vezérlőberendezések közelében, vagy azokra helyezve használni. Ha ez elkerülhetetlen, akkor a készülék rendeltetésszerű működését figyelemmel kell kísérni.
· Az előírtaktól eltérő tartozékok és tápkábel használata - a gyártó által a berendezéshez vagy rendszerhez forgalmazott, vagy belső komponensek cseréjére beépített kábelek kivételével - megnövekedett emissziót és a berendezés vagy rendszer csökkent védelmét eredményezheti.