

patella

GMed

GÉLLEL PÁRNÁZOTT  
LÁBUJJGYŰRŰ

Polimer gél és háló



Méret

● S ● M ● L

Tartalma: 1 db

Minőség és technológia az Ön egészségéért!



Polimer gél és háló

GÉLLEL PÁRNÁZOTT LÁBUJJGYŰRŰ

A lábujjakon lévő tyúkszemek és bőrkeményedések védelmére alkalmazható, valamint fájdalomcsillapításra, a kalapácsolású dörzsölődésének megszüntetésére, vagy hólyag kialakulása esetén. Méretre vághatósága révén tökéletes illeszkedést tesz lehetővé.

**HASZNÁLATA:** Lábujjakon való használatra.

**HOSSZÚSÁG:** 40 cm

**ELŐVIGYÁZATOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK:** A termék ne érintkezzen nyílt sebbel. Esetleges elváltozás, bőrreakció előfordulása esetén ne használja a terméket, forduljon orvosához! Amennyiben a termék már nem alkalmas (pl. megsérült) rendeltetészerű használatra, hagyjon fel annak alkalmazásával.

**TISZTÍTÁS:** Meleg, vagy hideg vízben mosható szappannal, vagy mosószerrel. Szobahőmérsékleten vagy törülközőre téve szárítsa! Javasoljuk, hogy hintőporral használja.

**TÁROLÁS:** Száraz, hűvös helyen tárolja az eredeti csomagolásában. Ne érintkezzen szennyező anyagokkal. Eleszközöktől távol tartandó!

**ÖSSZETÉTEL:** sebészeti elasztikus anyag (31% lycra, 69% elasztán), polimer gél (100% TPE) és ásványi olaj (USP)

*A termék hatékonysága függ a megfelelő méret kiválasztásától és használatától! Amennyiben hatástalannak ítéli meg a használatát, kérjük konzultáljon szakemberrel.*

**ELÉRHETŐ MÉRETEK:** S, M, L

patella



**Patella-96 Kft.**

2045 Törökbálint, Kisfaludy u. 49 - 1.

[www.gmed.hu](http://www.gmed.hu)

[www.gyogybolt.hu](http://www.gyogybolt.hu)

[www.epapucs.hu](http://www.epapucs.hu)

[info@patellamedical.hu](mailto:info@patellamedical.hu)

Tel: +36-1-248-5300

