



GMed LÁBKÖZÉP PÁRNA

Polimer gél

A talp fájdalmának gyors enyhítésére.



Mérete: Univerzális

Tartalma: 1 pár

Minőség és technológia az Ön egészségéért!



LÁBKÖZÉP PÁRNA

Polimer gél

Alkalmas arra, hogy enyhítse a lábközéptáji fájdalmat és talpi fascia gyulladás esetén a fájdalom csökkentésére, a talp diszkomfortjának enyhítésére. Alkalmazható a cipő által okozott nyomás és dörzsölés csökkentésére.

HASZNÁLATA: Húzza rá a harántemelőn található gyűrűt a második lábujjra (a nagy lábujj felől a kislábujj felé számolva) és igazítsa a lábához a harántemelőt a megfelelő kényelem eléréséig.

ÖSSZETÉTEL: Polimer gél, ásványi olaj (USP)

ELŐVIGYÁZATOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK: A termék ne érintkezzen nyílt sebbel. Esetleges elváltozás, bőrreakció előfordulása esetén ne használja a terméket, forduljon orvosához! Amennyiben a termék már nem alkalmas (pl. megsérült) rendeltetésszerű használatra, hagyjon fel annak alkalmazásával.

TISZTÍTÁS: Hideg vízben mosható. Árnyékos helyen szárítsa. Ne érintkezzen szennyező anyagokkal.

TÁROLÁS: Tárolja az eredeti csomagolásában. Éles eszközöktől távol tartandó!

A termék hatékonysága függ a megfelelő használattól!

ELÉRHETŐ MÉRETEK: Univerzális



Patella-96 Kft.

2045 Törökbálint, Kisfaludy u. 49 – 1.

www.gmed.hu

www.gyogybolt.hu

www.epapucs.hu

info@patellamedical.hu

Tel: +36-1-248-5300

