



HARÁNTEMLŐ AKTÍV BETÉT

100% szilikon



Tartalma: 1 pár
Mérete: Univerzális

Minőség és technológia az Ön egészségéért!

100% szilikon

HARÁNTEMLŐ AKTÍV BETÉT

Komfort és kényelem a jobb teljesítményért. Alkalmazható lábközéptáji fájdalom, talpi fascia gyulladás esetén, a talp diszkomfortjának és fájdalmának enyhítésére. Utódések csillapítására. A lábfej elülső részének rendellenességei, harántboltozat süllyedés, a cipők által okozott nyomás és dörzsölés csökkentésére használható. Kifejezetten nyitott cipőkben való használatra tervezve. Használható magassarkú cipőkben feltűnés nélkül, miközben védi lábát a sérülésektől. Masszírozó pontokkal van ellátva. Segít megakadályozni a cipő és láb közti súrlódást, hólyagok kialakulását, valamint a lábujjak között található pánt és a lábujjak súrlódását. Bármilyen típusú lábujjközös szandálban használható, de kifejezetten magassarkú lábujjközös szandálokhoz ajánljuk, a sarokemelés okozta nyomás enyhítése végett.

HASZNÁLATA: Kérjük vegye figyelembe az „R” – jobb cipőben való használatra és „L” – bal cipőben való használatra jelzéseket. A lábujjközös szandálban, csúsztassa előre a lábujjközög, hogy azt a gél réteg befedje. Használata előtt, tisztítsa meg a cipőt. A betét alsó részéről vegye le a műanyag fóliát és helyezze bele megfelelően a cipőbe. Ha más cipőben szeretné használni a terméket, vegye ki a cipőből, enyhén mossa le a ragasztó felét a betétnek és szárítsa meg dörzsölés nélkül. Többször felhasználható! Tárolja az eredeti csomagolásában.

ÖSSZETÉTEL: 100% szilikon, ragasztóanyag

ELŐVIGYÁZATOSÁGI INTÉZKEDÉSEK: A termék ne érintkezzen nyílt sebbel. Esetleges elváltozás, bőrreakció előfordulása esetén ne használja a terméket, forduljon orvosához! Amennyiben a termék már nem alkalmas (pl. megsérült) rendeltetészerű használatra, hagyjon fel annak alkalmazásával.

TISZTÍTÁS: Meleg, vagy hideg vízben mosható szappannal, vagy mosószerrel. Maximum 50°C-on szárítsa! Ne érintkezzen szennyező anyagokkal. Használatához nincs szükség hintóporra.

TÁROLÁS: Száraz, hűvös helyen tárolja az eredeti csomagolásában.

A termék hatékonysága függ a megfelelő használatától.
Éles eszközöktől távol tartandó!

MÉRET: Univerzális



Patella-96 Kft.
2045 Törökbálint, Kisfaludy u. 49-1.
www.gmed.hu
www.gyogybolt.hu
www.epapucs.hu
info@patellamedical.hu
Tel: +36-1-248-5300

