

 GMed **patella**
HARÁNTEMELO BETÉT

100% szilikon

Extra puha szilikon anyag
Ideális magassarkú cipőhöz



Tartalma: 1 pár
Mérete: Univerzális



100% szilikon

HARÁNTEMELO BETÉT

Alkalmas fájdalomcsillapításra, lábközéptáji fájdalom esetén és ütődések csillapítására. Speciálisan arra lett tervezve, hogy kényelmes és anatómiailag tökéletes illeszkedést tegyen lehetővé a nők alkalmi cipőiben, enyhítve a lábujjak és lábközép nyomását. Masszírozó pontokkal van ellátva.

HASZNÁLAT: A betétek nem rendelkeznek oldalisan nyílt sebbel. Esetleges elváltozás, bőrreakció előfordulása esetén ne használja a terméket, forduljon orvosához! Amennyiben a termék már nem alkalmas (pl. megsérült) rendeltetés szerű használatra, hagyjon fel annak alkalmazásával.

ELŐVIGYÁZATOSÁGI INTÉZKEDÉSEK: A termék ne érintkezzen nyílt sebbel. Esetleges elváltozás, bőrreakció előfordulása esetén ne használja a terméket, forduljon orvosához! Amennyiben a termék már nem alkalmas (pl. megsérült) rendeltetés szerű használatra, hagyjon fel annak alkalmazásával.

TISZTÍTÁS: Meleg, vagy hideg vízben mosható szappannal, vagy mosószerrel. Ne érintkezzen szennyező anyagokkal. Használatához nincs szükség hintóporra.

TÁROLÁS: Száraz, hűvös helyen tárolja az eredeti csomagolásában.

ÖSSZETÉTEL: 100% szilikon

A termék hatékonysága függ a használatától! Éles eszközöktől távol tartandó!

MÉRET: Univerzális

 **patella**

Patella-96 Kft.
2045 Törökbálint, Kisfaludy u. 49 – 1.
www.gmed.hu
www.gyogybolt.hu
www.epapucs.hu
info@patellamedical.hu
Tel.: +36-1-248-5300

