



patella

GMed SZILIKONOS SAROKÉK KÉK PONTTAL



100% szilikon

A sarkon lévő csontnyúlvány, valamint a láb hátsó részének fájdalma és egyéb rendellenesség esetén.

A terhelés
98%-át
elnyelheti



Méret

● S ● M ● L ● XL

Tartalma: 1 pár

Minőség és technológia az Ön egészségéért!



SZILIKONOS SAROKÉK KÉK PONTTAL

100% szilikon



Az oldalsó peremei és sarokformája alkalmassá teszik arra, hogy segítségével megfelelő anatómiai illeszkedést biztosítson a lábnak. Úgy tervezték, hogy hatását a sarok hátsó részétől fejtsse ki, nagy érintkezési felületet lefedve, fokozott hatékonyságot biztosítva a sarok rendellenességeinek kezelésére és azok megelőzésére. A puha szilikonból készült kék pont sűrűsége és merevsége segít a sarokra ható nyomás csökkentésében.

Alkalmas a sarkon lévő csontnyúlvány, csonttritkulás, Achilles-íngyulladás, Achilles-bursa gyulladás, saroktáji fájdalom, talpi fascia gyulladás, zúzódás és rándulás esetén, valamint a mozgás közben a sarokra ható ütődések csökkentésére. Kényelmes viseletet biztosít. Javasolt sportolók, különösen tornászok és atléták számára.

HASZNÁLATA: Helyezze a cipő belsejébe a sarok részre. Kérjük figyeljen a megfelelő méretű sarokék használatára.

ELŐVIGYÁZATOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK: A sarokék ne érintkezzen nyílt sebbel. Esetleges elváltozás, bőrreakció előfordulása esetén ne használja a sarokéket, forduljon orvosához! Amennyiben a termék már nem alkalmas (pl. megsérült) rendeltetészerű használatra, hagyjon fel annak alkalmazásával.

TISZTÍTÁS: Meleg, vagy hideg vízben mosható szappannal, vagy mosószerral. Maximum 50°C-on szárítsa! Ne érintkezzen szennyező anyagokkal! Használatához nincs szükség hintőporra.

TÁROLÁS: Száraz, hűvös helyen tárolja az eredeti csomagolásában. Éles eszközöktől távol tartandó!

A termék hatékonysága függ a megfelelő méret kiválasztásától és használatától! Amennyiben hatástalannak ítéli meg használatát kérjük, hogy konzultáljon szakemberrel.

ELÉRHETŐ MÉRETEK: S, M, L, XL

patella



Patella-96 Kft.

2045 Törökbálint, Kisfaludy u. 49 – 1.

www.gmed.hu

www.gyogybolt.hu

www.epapucs.hu

info@patellamedical.hu

Tel.: +36-1-248-5300

