



patella

**GMed**

**SZILIKONOS TALPBETÉT HARÁNTEMELEÉSSEL**

100% szilikon



Méret



34/35



36/37



38/39



40/41



42/43



44/45

Tartalma: 1 pár

Minőség és technológia az Ön egészségéért!




## SZILIKONOS TALPBETÉT HARÁNTEMELEÉSSEL

100% szilikon

Hosszanti boltozat (lúdtalp) és harántboltozat, lábközéptáji fájdalom, talpi fascia gyulladás esetén, a lábközép fájdalomnak enyhítésére, a lábfej elülső részei betegségeinek kezelésére és az ütődés gyengítésére.

A szilikonos talpbetét harántemeléssel, kíméletes talpboltozattal rendelkezik, amely figyelembe veszi a láb anatómiáját, és a nyugalom maximális érzését nyújtja. A boltív úgy működik, mint egy természetes emelő, amely véd és kerüli a felület érintkezését a lábközéppel, ezáltal új dinamikát adva használója járásának.

**HARÁNTBOLTOZAT EMELÉS**

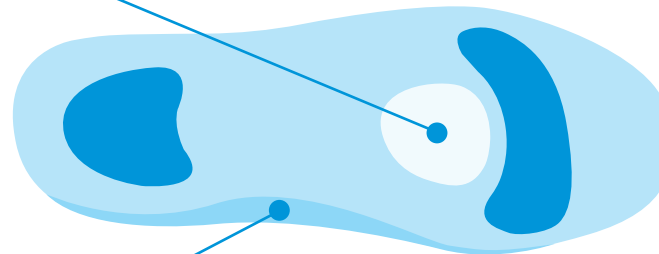

**HOSSZANTI BOLTOZAT EMELÉS**

**HASZNÁLATA:** Bármilyen cipőben használható.

**ELŐVIGYÁZATOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK:** A termék ne érintkezzen nyílt sebbel. Esetleges elváltozás, bőrreakció előfordulása esetén ne használja a terméket, forduljon orvosához! Amennyiben a termék már nem alkalmas (pl. megsérült) rendeltetésszerű használatra, hagyjon fel annak alkalmazásával.

**TISZTÍTÁS:** Meleg, vagy hideg vízben mosható szappannal, vagy mosószerrel. Maximum 50°C-on szárítsa! Ne érintkezzen szennyező anyagokkal. Használatához nincs szükség hintőporra.

**TÁROLÁS:** Száraz, hűvös helyen tárolja az eredeti csomagolásában.


**ÖSSZETÉTEL:** 100% szilikon

*A termék hatékonysága függ a megfelelő méret kiválasztásától és használatától! Éles eszközöktől távol tartandó!*

**ELÉRHETŐ MÉRETEK:** 34/35, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45

patella

**Patella-96 Kft.**  
2045 Törökbálint, Kisfaludy u. 49 – 1.  
www.gmed.hu  
www.gyogybolt.hu  
www.epapucs.hu  
info@patellamedical.hu  
Tel.: +36-1-248-5300

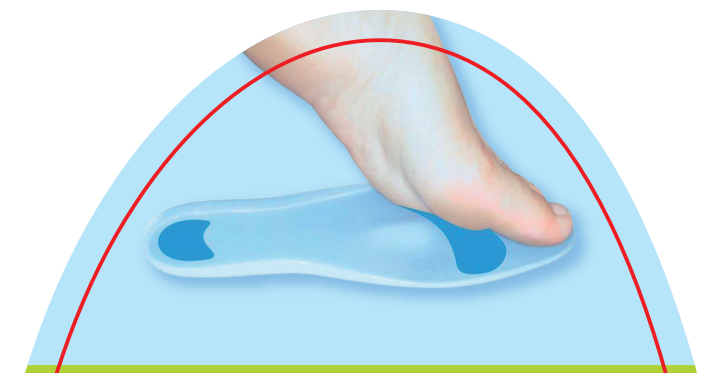

**GMed**

**SZILIKONOS TALPBETÉT HARÁNTEMELEÉSSEL**

100% szilikon