

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

GM 4295 KIFORDÍTHATÓ FÜRDŐKÁDÜLŐKE



Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi kérdések esetére. A jelen leírás az eszköz használati utasításait tartalmazza.

1. ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁS

Használat a nem teljesen elesett betegek számára javasolt, akár segítő közreműködésével. Az eszköz segítséget nyújthat a mozgásukban bármilyen okból időlegesen vagy tartósan akadályoztatott (betegség, műtét, sérülés, idősor miatt) személyek számára a kádban való tisztálkodás során. Megkönnyíti a kádba való be- és kiszállást, hiszen a kék korong lehetővé teszi az oldalirányú elfordulást. Biztonságosan lehetővé teszi a kádban való mosakodást a kád aljára történő leülés nélkül. Így elkerülhető az elcsúszás veszélye.

2. FELÍRÁSRA JOGOSULT SZEMÉLY

Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat), traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, sebészet, gyermeksebészet, érsebészet, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, geriátria, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is.


3. INDIKÁCIÓ

Paraplegia, hemiplegia, ataxia esetén.

4. TERMÉK LEÍRÁS

Alkatrész lista:

- 1x Ülőtábla
- 4x Láb
- 4x Ovális fejű csavar
- 4x Ovális csavartaláték
- 1x Kapaszkodó
- 2x Kerek fejű csavar
- 1x Forgó ülőkorong
- 1x Csavar

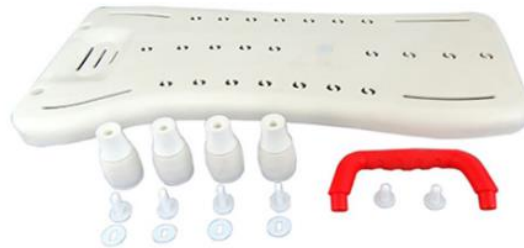

Alkatrészek leírása és alkalmazási célja:

Ülőtábla:

- rögzíthető minden szabványos fürdőkád szélére, így biztonságosan lehetővé teszi a kádban való mosakodást a kád aljára történő leülés nélkül
- anyaga fehér polipropilén, amely az ülőfelületen csúszásmentes felület kialakítású
- lyukacsos kialakítású a víz egyszerű elvezetéséért
- gumival ellátott felület a káddal való érintkezésnél a fürdőkád megkarcolása ellen
- kapaszkodóval, szappantartóval és forgó ülőkoronggal ellátott

Láb:

- anyaga fehér polipropilén
- az ülőtábla a lábak állításával biztonságosan rögzíthető a fürdőkád tetejére 46-68 cm között

Ovális fejű csavar:

- anyaga fehér polipropilén, a lábak ülőpadhoz rögzítésére szolgál

Kapaszkodó:

- anyaga piros polipropilén
- be és kiszállás közben rá lehet támaszkodni
- segíti a fürdőkádba való biztonságos és egyszerű beszállást és kilépést

Kerek fejű csavar:

- anyaga fehér polipropilén
- a kapaszkodó ülőpadhoz rögzítésére szolgál

Forgó ülőkorong:

- kék színű polipropilén
- 360°-ban körbe forgatható
- megkönnyíti a kádba való be- és kiszállást, hiszen a kék korong lehetővé teszi a felhasználó oldalirányú elfordulást

Csavar:

- az ülőkorong rögzítésére szolgál, az ülőpadban található menetbe illesztve
- anyaga műanyag

5. MŰSZAKI ADATOK

- Méretei: 76 cm x 35 cm x 9,5 cm
- Max. terhelhetőség: 110 kg
- Lábak állíthatóak 46-68 cm között
- Súlya: 2,8 kg
- Rögzíthető szinte minden szabványos fürdőkádnál szélére (kivéve sarokkádnál)
- Egyszerű és gyors, szerszámok nélküli összeszerelhető
- Könnyen tisztítható és karbantartható
- Max. terhelhetőség: 110 kg
- Súlya: 2,8 kg


6. ÖSSZESZERELÉS

1. Helyezze az ovális csavaralátéteket az ovális csavarra, majd helyezze a lábakat a padhoz a 4 darab csavarral rögzítse azokat de még ne húzza meg.



A két darab kerekfejű csavarral rögzítse a fogantyút a padhoz.

2. A lábakat állítsa be vízszintesen csúsztatva a padodon kialakított sínben, a fürdőkádnál szélességének megfelelően. A kívánt beállításnál fixálja a lábak pozícióját úgy, hogy feszülésig behajtja a csavarokat.

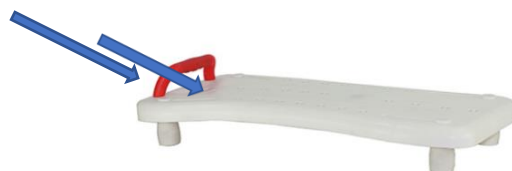

3. A kék színű forgatható korongot rögzítse a maradék egy csavarral a padon kialakított menetbe.



4. Élvezze az új, összeszerelt forgó fürdőkádnál padot!

7. TISZTÍTÁS

Használat után öblítse le a terméket, majd forgassa azt meg a felgyülemlett víz eltávolításához és törölje szárazra. Szükség esetén szappanos vízzel tisztítsa meg a terméket. Ne használjon csiszoló vagy kémiai tisztítókat, mert roncsolják az ülőke anyagát. Fertőző betegeknél való használat után fertőtlenítő szerrel tisztítsa meg a terméket.

8. GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ



Gyártó és forgalmazó:
Patella-96 Kft.
 HU-2045 Törökbálint
 Kisfaludy u 49-1.
 Tel.: +36 1 248 5300
 info@patellamedical.hu
 www.gmed.hu
 www.gyogybolt.hu
 www.epapucs.hu



Distributor:
SC Vital Logistic Srl.
 RO-540210 Tirgu Mures
 str Gheorghe Doja nr 177
 Corp C1-C2 Parter
 comenzi@vital-logistic.ro
 Tel.: +40 265 265 268
 www.vital-logistic.ro

9. VONALKÓDOK

