

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GM 4310 EGYENES KAPASZKODÓ



Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi kérdések esetére. A jelen leírás az eszköz használati utasításait tartalmazza.



1. ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁS

A kapaszkodók elősegíthetik a biztonságos környezet kialakítását. Az egyenes kapaszkodók elsősorban nedves, csúszós helyiségekben (fürdőszoba, zuhanyzó fülke, fürdőkád, WC) végzett tevékenység biztonságosabbá tételét szolgálhatja. Azok számára jelenthet segítséget, akiknek a tisztálkodás során a fürdőkádba történő be- és kilépés, valamint a leülés és felállás nehézséget okoz. Biztonságossá teszi a kádban való felállást, ki-be szállást, valamint a zuhanyzást. A kádban tartózkodáskor stabil kapaszkodási lehetőséget biztosít az eszköz, így használatával csökkenthető egy megcsúszásból eredő baleset kockázata. A házi betegápolásban, illetve szociális és egészségügyi intézményekben történő ellátásban egyaránt alkalmazható.

2. INDIKÁCIÓ

Tartós vagy maradandó mozgáskárosodással élőknek, egyensúlyzavarban szenvedők számára jelenthet segítséget.

3. FELÍRÁSRA JOGOSULT ORVOSOK MEGHATÁROZÁSA

ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, sebészet, gyermeksebészet, geriátria, csecsemő- és gyermekgyógyászat.

4. MŰSZAKI ADATOK

Anyaga rozsdamentes acél cső, fényes felületű fehér színben

Méreték: elérhető 30cm, 40cm, 50cm, 60cm, 70cm, 80cm, 90cm, 100cm hosszúságban

Átmérő 25,4 mm x vastagság 1,2 mm

A faltól való távolság: 70 mm

Termék súlya (mérettől függően): 0,5-1,1 kg

Maximális terhelés: 90 kg

Tartozékok: A felszereléshez és rögzítéshez szükséges tiplik és csavar a csomag része

5. A TERMÉK HASZNÁLATA

A GM 4310 keretét a kád oldalára kell rögzíteni a mellékelt tiplik és csavarok segítségével. A kapaszkodót 6db M5x50-es csavarral és a mellékelt tiplik segítségével rögzítjük a falba. 3-3 db csavarral rögzítse a kapaszkodó mind a két végét a falhoz, a csavarokat a furatokba illesztve. Az alkalmazás helyétől függően falra rögzíthető vízszintes, illetve függőleges helyzetben is.



A termék megfelelő rögzítése nagyon fontos! Csak olyan falazathoz rögzíthető, ahol a kapaszkodás során biztonságosan terhelhető. Vályogfalra nem szerelhető!



A falazat jellegének megfelelően más tiplit kell választani gipszkarton vagy porózus anyagú falaknál.



A fürdőkád kapaszkodó csak a hosszirányú keresztmetszetre merőlegesen és függőlegesen terhelhető!

Verziószám: GM 4310-2021/12/15_2.

6. A TERMÉK TISZTÍTÁSA

Fertőtlenítő hatású háztartási tisztítószerrel tisztítható. A háztartásokban használt nem agresszív, fertőtlenítő, semleges hatású tisztítószerrel tisztítható.

7. A TERMÉK KARBANTARTÁSA

A termék karbantartást nem igényel, időszakosan érdemes ellenőrizni, hogy a rögzített eszköz nem lazult-e ki!



GYÁTRÓ ÉS FORGALMAZÓ

Patella-96 Kft.
HU-2045 Törökbálint
Kisfaludy u 49-1.
Tel.: +36 1 248 5300
info@patellamedical.hu
www.gmed.hu
www.gyogybolt.hu
www.epapucs.hu



8. GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ

DISTRIBUTOR

SC Vital Logistic Srl.
RO-540210 Tirgu Mures
str Gheorghe Doja nr 177
Corp C1-C2 Parter
comenzi@vital-logistic.ro
Tel.: +40 265 265 268
www.vital-logistic.ro

9. VONALKÓD

