

GM egy légkamrás antidecubitus ülőpárna
GM két légkamrás antidecubitus ülőpárna
TERMÉKLEÍRÁS

A GM antidecubitus ülőpárna kiválóan alkalmazható kemény felületen az ülő pozíció javítására és felfekvés megelőzésére.

Használható: kerekesszékekben, autózülésen, padon, széken és bármilyen egyéb ülőfelületen.

Az ülőpárna egy közös alapra helyezett több egymással összeköttetésben lévő, levegővel töltött, szilikongél tetejű, hőre lágyuló poliuretán cellákból áll.

Használat közben a felhasználó súlya terheli az egyes cellákat, aminek következtében a nagyobb nyomású cellákból a kisebb nyomású cellákba áramlik a levegő. Ennek következtében a nyomás eloszlik, és a párna felveszi a test formáját, illetve fenntartja a megfelelő helyzetet. Az ülő személy testsúlyának egyenletes eloszlásával javítható, a nagy nyomásnak kitett puha szövetek vérkeringése, megakadályozva ezzel a felfekvés panaszok kialakulását.

A párna huzatának felső rétegét fényes dörzsölő borítás fedi, az alsó rétege vízzáró poliuretán. A párnahuzat mosható, illetve fertőtleníthető. A belső rész nem szív magába nedvességet, így inkontinens betegek részére is ajánlott. A párnahuzat megelőzi a bőr irritációját és dörzsölését, továbbá lehetővé teszi a levegő áramlását a test és a párna között.

Összsúly: ~1,6 kg

Maximális teherbírás: 130 kg, mérettől függetlenül.

Méretek:

- egy légkamrás 40x40 cm
- két légkamrás 40x40 cm
- két légkamrás 40x45 cm

Tartozékok: párnahuzat, kézipumpa

TERMÉK HASZNÁLATA

A GM antidecubitus ülőpárnát úgy kell elhelyezni a kerekesszékekben vagy a használni kívánt felületen, hogy a sötétszürke, csúszásgátló réteggel borított felsőrész legyen alul, illetve az alsó rész lekerekített sarkai helyezkedjenek el a hátsó részen.

Előkészítés használatra:

- Vegye ki a biztonsági dugót a szelepből!
- Dugja bele a pumpa fém végét a szelepbe!
- Pumpálja addig a párnát levegővel, amíg közepesen kemény nem lesz!
- Üljön a párnára, és a szelep oldal irányú összenyomásával engedjen ki annyi levegőt, hogy kb. 1,5 cm magas levegőréteg maradjon a párna alapja és a legjobban terhelt rész

között!

- Helyezze vissza a biztonsági dugót és tegye a párnát a huzatba úgy, hogy a szelep a huzat nyitott vége felé essen, majd rögzítse a huzat nyitott végét a tépőzárral!



Figyelem!

A párna teljes leeresztése során az összes levegőt ki kell engedni a párnából! A párnát semmilyen esetben sem szabad túlfújni, illetve addig pumpálni, míg teljesen feszes nem lesz! Ügyeljen rá, hogy használat során mindig legyen bent elég levegő, a cellák alja ne érjen hozzá az alaphoz!

TISZTÍTÁS – FERTŐTLENÍTÉS - JAVÍTÁS

A párna huzata langyos, semleges szappanos vízben vagy mosógépben 30 °C-on mosható. Ha szükséges, a felfújható rész is tisztítható langyos (nem meleg és forró!) vizes, szappanos ruhával áttörölhető.



Figyelem!

A huzat mosása előtt a párnát el kell távolítani a huzatból! Ne használjon dörzshatású tisztítószeret és oldószert a tisztításhoz! A tisztítás végezetével a felfújható részt teljesen szárazra kell törölni! Ne szárítsa magas hőmérsékleten!

Ne tegye ki közvetlen hőhatásnak a terméket!

A párna fertőtlenítése előtt minden esetben meg kell tisztítani a párnát! A fertőtlenítési folyamat során csak és kizárólag a meghatározott fertőtlenítő oldatokat használja! A párna javítását bízza szakemberre, forduljon a szakszervizhez!



Gyártó és Forgalmazó

Patella-96 Kft.

HU-2045 Törökbálint Kisfaludy u. 49-1.

www.patella.hu, www.gyogybolt.hu, www.gmed.hu

info@patella.hu

+36 1 248 5300



Vonalkódok:

Egy légkamrás 40x40 cm	 5 999542 971419
Két légkamrás 40x40 cm	 5 999542 971426
Két légkamrás 40x45 cm	 5 999542 971433