

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GMED 4 RÉSZES ÖSSZECSUZHATÓ ÁLLÍTHATÓ JÁRÓBOT




Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi kérdések esetére. A jelen leírás az eszköz használati utasításait tartalmazza.

1. ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁS



A járóbot személyes mozgást segítő eszköz. Mindenki számára javasolt, aki könnyíteni szeretne a járásán. Botjaink biztonságos kialakítása, stabil támaszt nyújthatnak kültéri és beltéri használatkor egyaránt. Baleset vagy betegség következtében ajánlott lehet a járóbot használata, azok számára, akiknek az alsó végtagjuk tehermentesítése, valamint járásbiztonsága ily módon megoldható. Javasolt azok számára, akik alsó végtagjaik ízületi kopásának fájdalmától, gyulladástól szenvednek. Gyermekkori fejlődési rendellenesség, bénulás következtében kialakult nehézkes járás esetén is segítség lehet. Használata javasolt balesetet vagy műtétet követő rehabilitációs időszak alatt (pl. alsó végtag protézisálása; a járás nehézkessé vált emiatt segítségre szorul; a végtag amputációja esetén). Fizikai gyengeség, vagy egyensúlyzavar, illetve mozgáskoordinációs problémák esetén is azonnali megoldást nyújthat.

2. MŰSZAKI ADATOK

Váz:	<ul style="list-style-type: none">a váz könnyített alumínium ötvözetből készült4 szekcióból álló egymásba csúsztatott alumínium cső alkotjafelső cső átmérője 22mm, alsó cső átmérője 19 mmrozsdamentesporszórással fekete színű felületcsuklópánttal ellátott
Markolat:	<ul style="list-style-type: none">az ergonomikusan kialakított, műanyagból (polipropilén) formára öntött T-alakú markolat könnyed fogást biztosítszéles kialakításának köszönhetően még görcsös ujjakkal is egyszerűen megmarkolhatóéresített tenyértámasza a kényelmes megtámaszkodást szolgálja
Botvég: 	<ul style="list-style-type: none">gumiból készült cserélhető botvégmérete 18 mmfekete színűa gumivég 1 pontban érinti az földet az egyensúly és a mozgás érdekében, elősegítheti a könnyű sétát bármilyen felületena csúszásgátló gumi felülete hozzátapad pl. a járda felületéhez, ezáltal jobb stabilitást biztosíthatcserélhető, ha a gyakori használat során elhasználódik

3. A TERMÉK HASZNÁLATA

Az első használat előtt a járóbot magasságát be kell állítani a felhasználó magasságának és a testsúlyának megfelelően. A járóbot magassága akkor megfelelő, ha használat közben a markolat csípő-csukló magasságban van. A maximális terhelhetőség, amit a járóbot elbír 90 kg. A bot saját tömege 0,3 kg.

Szétnyitás és összezsuklás:

A bot 4 részben összezsukható, hossza összezsukva 31 cm. Könnyebben tárolható, amely előnyös lehet zsúfolt területeken, pl. osztályteremben, vagy közösségi eseményeken. A csonkok egy gumi szallagra vannak felhúzva. Összezsukáshoz válasszuk szét a csonkokat, ilyenkor azok egymás mellett helyezkednek el. Ezen a módon az átlátszó műanyag tartó tokba könnyen elcsomagolható. Szétnyitáshoz illesszük egymásba a csonkokat amíg azok rögzülnek.

Magasság állítása:

- Magasság állítás előtt a rögzítő gyűrűt oldja meg!
- Az állítócső helyzetét, a felső cső, illetve az alsó cső sugár irányú furatába helyezett, rugós rögzítő gombok használatával lehet beállítani 5 fokozatban 85-95 cm között
- Az állítócső illeszkedését a csővégeken található műanyag vezetőelemek segítik. Győződjön meg róla, hogy a csőre pattintható műanyag fejbe ágyazott acél rögzítő csap megfelelően bepattant-e a helyére!
- Miután beállította a megfelelő magasságot, mindig szorítsa meg a rögzítő gyűrűt!

Használat:

A járóbotot mindig a stabilabb oldali kézben tartsuk! Lépéskor helyezzük előre, majd a gyengébb lábbal lépünk. Az elkopott botvég gumit könnyedén tudja cserélni vagy pótolni. A gumi kopása esetén nem szükséges a teljes terméket lecserélni, mivel az külön is megvásárolható a termék forgalmazójánál.

A termék használata során törekedni kell arra, hogy a helyesen kialakított mozdulatok a begyakorlás által automatikussá váljanak, és a mindennapi mozgást megkönnyítsék!

⚠ Ha a gumivég gumi elkopott, akkor nem fog tapadni és könnyen megcsúszhat. Ellenőrizze rendszeresen és cserélje, ha elhasználódott!

⚠ Csapadéktól nedves felületen közlekedjen óvatosabban! Kisebb és lassabb lépésekkel mozogjon a járóbottal, mivel a nedves, vizes felületen fokozottan nagy a csúszás és a baleset veszélye!

⚠ A járóbot elsősorban hosszirányú terhelés felvételére alkalmas, ezért kerülni kell a járóbot nem rendeltetésszerű terhelését! A használati útmutatótól eltérő használatból, túlerhelésből, átalakításból és helytelen kezeléssel eredő károkat a gyártó nem vállal felelősséget, így a jóállás nem érvényesíthető!

4. A TERMÉK TISZTÍTÁSA

A járóbot a háztartásokban használt nem agresszív hatású tisztítószerrel tisztítható. Mosás után bő vízzel öblítse le, és száraz ruhával törölje át!

5. A TERMÉK KARBANTARTÁSA

A termék karbantartást nem igényel, időszakosan érdemes ellenőrizni a botvég gumi kopását, elhasználódás esetén cserélni kell.

6. VONALKÓD



9. GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ

Tájékoztatjuk, hogy az eszközzel kapcsolatban előforduló váratlan eseményeket jelenteni kell a gyártónak és a

felhasználó és/vagy a beteg letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságának. A magyarországi illetékes hatóság: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet.



GYÁTRÓ ÉS FORGALMAZÓ

Patella-96 Kft.

2045 Törökbálint

Kisfaludy u 49-1.

www.gmed.hu

www.gyogybolt.hu

www.epapucs.hu

E-mail: info@patellamedical.hu

Tel.: +36 1 248 5300



DISTRIBUTOR

SC Vital Logistic Srl.

540210 Tirgu Mures

Str Gheorghe Doja nr 177

Corp C1-C2 Parter, Romania

www.vital-logistic.ro

E-mail: comenzi@vital-logistic.ro

Tel.: +40 265 265 268