

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GMED 4345 TRUSTY CANE (BIZTONSÁGI) JÁRÓBOT



Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi kérdések esetére. A jelen leírás az eszköz használati utasításait tartalmazza.

1. ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁS



A járóbot személyes mozgást segítő eszköz. Mindenki számára javasolt, aki könnyíteni szeretne a járásán. Botjaink biztonságos kialakítása, stabil támaszt nyújthatnak kültéri és beltéri használatkor egyaránt. Baleset vagy betegség következtében ajánlott lehet a járóbot használata, azok számára, akiknek az alsó végtagjuk tehermentesítése, valamint járásbiztonsága ily módon megoldható. Javasolt azok számára, akik alsó végtagjaik ízületi kopásának fájdalmától, gyulladásától szenvednek. Gyermekkori fejlődési rendellenesség, bénulás következtében kialakult nehézkes járás esetén is segítség lehet. Használata javasolt balesetet vagy műtétet követő rehabilitációs időszak alatt (pl. alsó végtag protézisálása; a járás nehézkessé vált emiatt segítségre szorul; a végtag amputációja esetén). Fizikai gyengeség, vagy egyensúlyzavar, illetve mozgáskoordinációs problémák esetén is azonnali megoldást nyújthat.

2. MŰSZAKI ADATOK

Váz:	- a váz könnyített alumínium ötvözetből készült - rozsdamentes - porszórással feketére színezett felület - csuklópánttal ellátott
Markolat:	- az ergonomikusan kialakított, a műanyagból (polipropilén) formára öntött T-alakú markolat könnyed fogást biztosít - széles kialakításának köszönhetően még görcsös ujjakkal is egyszerűen megmarkolható - érdesített tenyértámasza a kényelmes megtámaszkodást szolgálja - markolatba épített LED fény - a világítást 2 db AA elem biztosítja (az elem nem tartozék)
Botvég:	- speciális talpvég: elforgatható és kiszélesített fém talp (felső részén 6 cm, alsó részén 9 cm átmérőjű) - a talp különleges kialakításának köszönhetően nagyobb biztonságot, és jobb stabilitást nyújthat, mivel a gumivégek 4 pontban érintik az földet, elősegítve a sétat bármilyen felületen - megkönnyítheti az ülő helyzetből való felállást - a botvégek csúszásgátló gumi felületei hozzátapadnak pl. a járda felületéhez, ezáltal jobb stabilitást biztosíthat a bot használata

3. A TERMÉK HASZNÁLATA

Az első használat előtt a járóbot magasságát be kell állítani a felhasználó magasságának és a testsúly megfelelően. A járóbot magassága akkor megfelelő, ha használat közben a markolat csípő-csukló magasságban van. A maximális terhelhetőség, amit a járóbot elbírt 90 kg.

Magasság állítása:

- Magasság állítás előtt a rögzítő gyűrűt oldja meg!
- Az állítócső helyzetét, a felső cső, illetve az alsó cső sugár irányú furatába helyezett, rugós rögzítő gombok használatával lehet beállítani 79-100 cm között

- Az állítócső illeszkedését a csővégeken található műanyag vezetőelemek segítik. Győződjön meg róla, hogy a csőre pattintható műanyag fejbe ágyazott acél rögzítő csap megfelelően bepattant-e a helyére!
- Miután beállította a megfelelő magasságot, mindig szorítsa meg a rögzítő gyűrűt!

Használat:

A járóbotot mindig a stabilabb oldali kézben tartsuk! Lépéskor helyezzük előre, majd a gyengébb lábbal lépünk.

LED fény bekapcsolása:

A fény felkapcsolásához nyomja meg a gombot a markolaton. Megvilágíthatja vele az utat.

A fény lekapcsolásához nyomja meg a gombot a markolaton újra.

Elemcsere: Fordítsa el a markolaton lévő tetőt az óramutató járásával ellentétes irányba amíg ki nem nyílik és helyezze be az elemet. Fordítsa el a tetejét az óramutató járásának irányába addig, amíg nem szorul.



A termék használata során törekedni kell arra, hogy a helyesen kialakított mozdulatok a begyakorlás által automatikussá váljanak, és a mindennapi mozgást megkönnyítsék!



Csapadéktól nedves felületen közeledjen óvatosabban! Kisebb és lassabb lépésekkel mozogjon a járóbottal, mivel a nedves, vizes felületen fokozottan nagy a baleset veszélye!



A járóbot elsősorban hosszirányú terhelés felvételére alkalmas, ezért kerülni kell a járóbot nem rendeltetésszerű terhelését! A használati útmutatótól eltérő használatból, túlterhelésből, átalakításból és helytelen kezeléssel eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget, így a jótállás nem érvényesíthető!

4. A TERMÉK TISZTÍTÁSA

A járóbot a háztartásokban használt nem agresszív hatású tisztítószerekkel tisztítható. Mosás után bő vízzel öblítse le, és száraz ruhával törölje át!

5. A TERMÉK KARBANTARTÁSA

A termék karbantartást nem igényel, időszakosan érdemes ellenőrizni a botvég állapotát.

6. VONALKÓD



9. GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ

Tájékoztatjuk, hogy az eszközzel kapcsolatban előforduló váratlan eseményeket jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságának. A magyarországi illetékes hatóság: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet.



GYÁTRÓ ÉS FORGALMAZÓ

Patella-96 Kft.

2045 Törökbálint

Kisfaludy u 49-1.

www.gmed.hu

www.gyogybolt.hu

www.epapucs.hu

E-mail: info@patellamedical.hu

Tel.: +36 1 248 5300



DISTRIBUTOR

SC Vital Logistic Srl.

540210 Tirgu Mures

Str Gheorghe Doja nr 177

Corp C1-C2 Parter, Romania

www.vital-logistic.ro

E-mail: comenzi@vital-logistic.ro

Tel.: +40 265 265 268