

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GMED 4265 FELÁLLÁST SEGÍTŐ JÁRÓKERET



Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi kérdések esetére. A jelen leírás az eszköz használati utasításait tartalmazza.

1. ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁS

A mozgást és járást segítő nagy stabilitást adó járókeretek segítséget nyújthatnak a biztonságos helyváltoztatásban. Ezek a két karral működtetett járást segítő eszközök több ponton stabilan adnak megtámasztást, nagyfokú lépésbiztonságot jelentve a mozgásban korlátozott felhasználóknak a lakásban és kültéren egyaránt.

2. INDIKÁCIÓ

A mozgást és járást, segítő nagy stabilitást biztosító járókeretek segítséget nyújthatnak a biztonságos helyváltoztatásban. Ezek a két karral működtetett járást segítő eszközök, több ponton stabilan adhatnak támasztékot, nagyfokú lépésbiztonságot biztosítva a mozgásban korlátozott használójuk számára. Beltéren és kültéren egyaránt használható. Azoknak a személyeknek nyújthat segítséget, akiknek alsó végtagjuk tehermentesítése, valamint állás -és járásbiztonsága ily módon megoldható, azonban többirányú támasztásra is szükségük van. Mozgáskoordinációs zavar esetén javítja a járóképeséget, illetve tehermentesítheti a sérült vagy fáradt lábat. Javasolt lehet azok számára, akik az alsó végtagjaik ízületi kopásának fájdalmától, gyulladásától, reumás vagy egyéb mozgásszervi panasztól szenvednek. Baleset vagy betegség következtében szintén ajánlott lehet használata. Gyermekekkori fejlődési rendellenesség, vagy bénulás következtében kialakult nehézkes járás esetén is segítség lehet. Az alsó végtag protézisét követően, a műtét követő rehabilitáció időszakában járása nehezessé vált, emiatt segítségre szorul. Fizikai gyengeség, illetve egyensúlyzavar esetén is azonnali megoldást nyújthat. A felállást segítő járókeret segíti a felhasználót a székről felállásban, ágyból történő felkelésben, majd normál járókeretként használható. Azoknak ajánljuk, akiknek nehezen megy a felállás.

3. MŰSZAKI ADATOK

- Váz:** Extra könnyű alumínium váz
Rozsda mentes felület
Max. terhelhetőség 133 kg
Lépcsőzetes kialakítású váz
Súly 2,4 kg
Váz mérete: magasság 78 cm, szélesség 52 cm, hossz 50 cm
- Markolat:** Gumival borított formatervezett markolatok
4 db markolat két szinten, az első szinten a min. 50 cm magasságban elhelyezett markolatok a könnyebb felállást segítik elő
- Lábazat:** Beltéri és kültéri használatra egyaránt használható
Állítható magasság 5 fokozatban 78-88 cm között, 2 cm-ként
- Botvég:** Gumiból készült végek, melyek 4 pontban érintik a földet a tökéletes egyensúly és mozgás érdekében, illetve elősegítik a könnyű sétát bármilyen felületen
Cserélhető, ha a gyakori használat során elhasználódik



4. A TERMÉK HASZNÁLATA

Magasság beállítása: Az első használat előtt a járókeret magasságát be kell állítani és üzembe helyezni. A beállítás során a járókeret mind a négy lábát be kell állítani a felhasználó magasságának és testsúlyának megfelelően. A járókeret magassága akkor megfelelő, ha használat közben terhelve, a könyök kiegyenesedik, míg Ön a keretben állva kissé behajlik.



A páciens számára megfelelő magasság beállításáról érdemes konzultálni háziorvossal illetve gyógytornásszal!

A járókeret lábainak alsó része állítható. A lábakon elhelyezett fém csapok megnyomásával tudjuk le- és felfelé állítani a lábak hosszát. A beállítás elvégzése során fontos, hogy minden fém csapot a megfelelő pozícióba (vízszintesen egy vonalba) igazítsunk. Magasság állítás előtt a rögzítő gyűrűt oldja meg! Az állítócső helyzetét, a felső cső, illetve az állítócső sugár irányú furatába helyezett, rugós rögzítő gombok használatával lehet beállítani. Az állítócső illeszkedését a csővégeken található műanyag vezetőelemek segítik. Győződjön meg róla, hogy a gomb megfelelően bepattant-e a helyére! Miután beállította a megfelelő magasságot, mindig szorítsa meg a rögzítő gyűrűt!

Összecsukás/kinyitás: Könnyebb tárolhatóság és kis hely esetén nagyon egyszerűen össze lehet csukni. A felső áthidalón lévő gomb lenyomása után a járókeret oldalait be lehet hajtani. Ismételt használatkor a keret két oldalát kinyitjuk, míg nem halljuk az összeütközést jelző kattanást. Összecsukott állapotban szélessége 7 cm.

Botvég gumi: A járókeret használata előtt ellenőrizni kell a lábak végén található botvég gumik megfelelő illeszkedését a talajhoz. A mindennapi használat során a gumik természetes kopásnak vannak kitéve. Az elkopott botvég gumikat javasolt kicserélni, mivel ilyen esetekben már nem nyújtanak teljes biztonságot a járókeret stabilitásának. A gumik kopása esetén nem szükséges a teljes terméket lecserélni, mivel a botvég gumik külön is megvásárolhatóak a termék forgalmazójánál.



Ha a gumivég elkopott, akkor nem fog tapadni és könnyen megcsúszhat. Ellenőrizze rendszeresen és cserélje ki, ha elhasználódott.



A termék használata során törekedni kell arra, hogy a helyesen kialakított mozdulatok a begyakorlás által automatikussá váljanak, és a mindennapi mozgást megkönnyítsék!



Csapadéktól nedves felületen közlekedjen óvatosabban! Kisebb és lassabb lépésekkel mozogjon, mivel a nedves, vizes felületen fokozottan nagy a csúszás és a baleset veszélye!



A járókeret elsősorban hosszirányú terhelés felvételére alkalmas, ezért kerülni kell a nem rendeltetésszerű terhelését! A használati útmutatótól eltérő használatból, túlterhelésből, átalakításból és helytelen kezeléssel eredő károkat a gyártó nem vállal felelősséget, így a jótállás nem érvényesíthető!

5. A TERMÉK TISZTÍTÁSA

Fertőtlenítő hatású háztartási tisztítószerrel tisztítható. A háztartásokban használt nem agresszív, semleges hatású tisztítószerekkel tisztítható. A mosás után tiszta vízzel öblítse le, majd száraz ruhával törölje át!

6. A TERMÉK KARBANTARTÁSA

A termék karbantartást nem igényel, időszakosan érdemes ellenőrizni a botvég gumik kopását.

7. VONALKÓD



8. GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ

Tájékoztatjuk, hogy az eszközzel kapcsolatban előforduló váratlan eseményeket jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságának. A magyarországi illetékes hatóság: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet.



Gyártó és forgalmazó:
Patella-96 Kft.
HU-2045 Törökbálint
Kisfaludy u 49-1.
Tel.: +36 1 248 5300
info@patellamedical.hu
www.gmed.hu
www.gyogybolt.hu
www.epapucs.hu



Distributor:
SC Vital Logistic Srl.
RO-540210 Tirgu Mures
str Gheorghe Doja nr 177
Corp C1-C2 Parter
comenzi@vital-logistic.ro
Tel.: +40 265 265 268
www.vital-logistic.ro