

Rendeltetése, javallat, leírás:

GM-C4 merev nyakrögzítő gallér, a gerinc nyaki szakaszának rögzítésével segíti a fájdalommal járó mozgulatok elkerülését. Dupla csatos felépítése biztos rögzítést nyújthat a nyaknak. A gallér támasztást biztosít az állkapocscsontnál, valamint a kulcscsontnál, így a nyaki gerinc szakasz kényelmes, természetes helyzetében kerülhet rögzítésre. A 2 tartólemez tépőzárral illeszkedik, megnyitásával a megtámasztás magassága állítható. A szellőzőnyílásokkal ellátott kialakítása elősegíti a viszonylag könnyen izzadó nyaki résznek kényelmét és szellőzését. Mind az alsó, mind a felső szélén egy puhább, a kényelmet elősegítő kialakítás található.



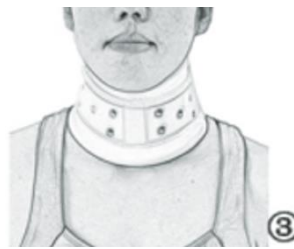
A megfelelő méret a nyak körmérete alapján választható.

	S	M	L
Magassága	9 cm	9 cm	9 cm
Vastagsága	2 cm	2 cm	2 cm
Hossza	37-42 cm	42-47 cm	47-52 cm

Figyelem!

1. Használat előtt olvassa el a felhelyezési útmutatót!
2. Folyamatosan viselje a nyakrögzítőt! Használatával a kezelőorvos utasítására hagyjon fel!
3. Naponta ellenőrizze a bőr állapotát! (bőrpír, érzékenység)

A felhelyezés lépései:

		
Tartsa a gallért az ábrán látható módon! A mellkas irányából, finoman csúsztassa fel a nyakortézis elülső részét az áll alá! Bizonyosodjon meg arról, hogy megfelelően került felhelyezésre!	Vezesse a nyak körül a pántokat hátra, kerülve a fej megmozdítását! A tépőzár segítségével, rögzítse az ortézist!	Ellenőrizze, hogy a nyakortézis felhelyezése és rögzítése megfelelő, és szorosan illeszkedik a nyakhoz!

Tisztítás:

Tisztítsa vízzel átitatott ronggyal, és természetes úton szárítandó!

Tárolása:

Közvetlen hőtől távol tartandó!

Összetétel:

nejlon, poliészter hab

Tájékoztatjuk, hogy az eszközzel kapcsolatban előforduló váratlan eseményeket jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságának. A magyarországi illetékes hatóság: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet.

Gyártó és forgalmazó:

Patella – 96 Kft.

2045 Törökbálint, Kisfaludy u. 49 – 1.

Web: www.gmed.hu

Web: www.gyogybolt.hu

Web: www.epapucs.hu

E-mail: info@patellamedical.hu

Tel.: +36 1 248-5300

Distributor:

SC Vital Logistic Srl.

540210 Tirgu Mures

Str Gheorghe Doja nr 177, Corp C1-C2 Parter,

Romania

Web: www.vital-logistic.ro

E-mail: comenzi@vital-logistic.ro

Tel.: +40 265-265-268

MD

CE

Vonalkód

S	M	L
		
5 999542 970429	5 999542 972423	5 999542 973420

Utilizare, indicație, descriere:



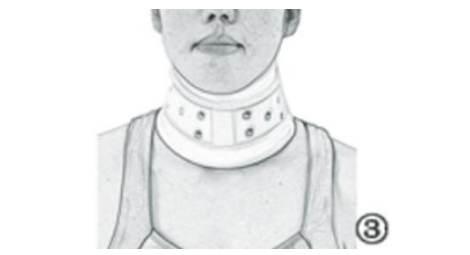
Gulerul de susținere rigidă a gâtului GM-C4, ajută la evitarea mișcărilor dureroase prin fixarea părții cervicale a coloanei vertebrale. Construcția sa cu sistem de închidere dublu poate oferi o fixare sigură pentru gât. Gulerul oferă sprijin atât la nivelul maxilarului, cât și la nivelul claviculei, astfel încât secțiunea cervicală a coloanei vertebrale să poată fi fixată într-o poziție confortabilă și naturală. Cele 2 plăci de sprijin sunt prevăzute cu Velcro, care se deschid pentru a regla înălțimea suportului. Designul perforat ajută la menținerea confortabilă și aerisită a gâtului care transpiră relativ ușor. Atât marginile inferioare, cât și cele superioare au un design mai moale pentru confort.

Dimensiunea potrivită poate fi selectată pe baza circumferinței gâtului.

	S	M	L
Înălțime	9 cm	9 cm	9 cm
Grosime	2 cm	2 cm	2 cm
Lungime	37-42 cm	42-47 cm	47-52 cm

Atenție!

1. Citiți instrucțiunile de așezare înainte de utilizare!
2. Purtați gulerul cervical tot timpul! Renunțați la folosirea acestuia la sfatul medicului dumneavoastră!
3. Verificați zilnic starea pielii! (roșeață, sensibilitate)

Pași pentru așezare:		
		
Țineți gulerul așa cum se arată în poză. Din direcția pieptului, mișcați ușor partea din față a ortezei cervicale în sus, sub bărbie. Asigurați-vă că este așezată corect!	Trageți curelele în jurul gâtului spre spate, evitând mișcarea capului! Cu ajutorul Velcro-ului, fixați orteza!	Asigurați-vă că orteza cervicală este așezată și fixată corect și că se potrivește perfect în jurul gâtului!

Curățare:

Se curăță cu o cârpă înmuiată în apă și se usucă natural!

Depozitare:

A se păstra departe de căldura directă!

Compoziție:

nylon, poliester

Vă rugăm să rețineți că evenimentele neașteptate cu dispozitivul trebuie raportate producătorului și autorității competente a utilizatorului și/sau a statului membru de stabilire a pacientului. Autoritatea competentă din România: ANMDM – Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor medicale din România.

Gyártó és forgalmazó:
Patella – 96 Kft.
2045 Törökbálint, Kisfaludy u. 49 – 1.
Web: www.gmed.hu
Web: www.gyogybolt.hu
Web: www.epapucs.hu
E-mail: info@patellamedical.hu
Tel.: +36 1 248-5300

Distribuitoar:
SC Vital Logistic Srl.
540210 Tirgu Mures
Str Gheorghe Doja nr 177, Corp C1-C2 Parter,
Romania
Web: www.vital-logistic.ro
E-mail: comenzi@vital-logistic.ro
Tel.: +40 265-265-268



Cod de bare

S	M	L
		
5 999542 970429	5 999542 972423	5 999542 973420