

15.7\*9.8\*2.5 cm

## HU

A GMed bambusz szorítók könnyű, 4 irányban rugalmas kivitelben, bambusz szénnel készülnek. A szén erős légáteresztő tulajdonságának köszönhetően hozzájárulhat a megfelelő szellőzéshez, és a nedvesség elvezetéshez. Hőmérséklet szabályzó hatásának köszönhetően, viselete hideg időben ideális gondoskodás lehet ízületeink számára. Latex szál alapanyaga elősegíti a megfelelő illeszkedést, így körülölheti a térdet. Minőségi, tartós, kötött kialakítása hozzájárulhat a maximális kényelméhez. A térdízület melegen tartását, a vérkeringést segíti. Támogatást biztosíthat az ízületek és izmok számára, így csökkentheti a fájdalmat. Használható sportoláshoz, mindennapi használatra, ízületi sérülések megelőzésére.

### Figyelem!

Viselés során esetlegesen felmerülő bőr allergia, irritáció esetén, hagyjon fel a használatával és egyeztessen orvosával!

### Összetétel:

Bambusz szén, nejlón, spandex, latex szál



### Tisztítási útmutató:

Tisztítsa kézzel, enyhén szappanos, langyos vízzel! Ne vasalja! Ne szárítsa ruhaszárító gépben! Ne használjon fehérítőt! Szellős helyen szárítsa, közvetlen hőforrástól távol!

## RO

Orteza de sustinere GMed este fabricată din material ușor cu fir din bambus, flexibil cu întindere în 4 direcții, tratat cu cărbune de bambus. Datorită permeabilității puternice la aer a cărbunelui, acesta contribuie la o ventilație adecvată și la eliminarea umezelii. Datorită efectului său de reglare a temperaturii, purtarea pe vreme rece poate fi o îngrijire ideală pentru articulații. Materialul de bază din fibră de latex are o compresie adecvată, astfel încât să sustină corect genunchiul. Designul tricatat de înaltă calitate, durabil contribuie la confortul dvs. maxim. Menține în cald articulația genunchiului și favorizează circulația sângelui. Oferă sprijin articulațiilor și mușchilor, reducând astfel durerea. Poate fi folosit pentru sport, pentru utilizarea de zi cu zi, pentru a preveni leziunile articulare.

### Atenție!

În caz de alergii ale pielii sau iritații care pot apărea în timpul utilizării, încetați să mai îmbracați orteza și consultați medicul pentru alta recomandare!

### Compoziție:

Cărbune de bambus, nailon, spandex, fir de latex

### Instrucțiuni de curățare:

Curățați manual cu săpun și apă caldă. Nu calcați! Nu uscați în mașina de uscat rufe! A nu se folosi înălbitor! Uscați în loc ventilat, departe de sursele directe de căldură!

Verziószám:  
GMed bambusz térdszorító -  
2024/06/25



patella

Distribuitor:  
SC Vital Logistic Srl

540210 Tirgu Mures,  
Str. Gheorghe Doja nr. 177,  
Corp. C.F.Z. Parter, Romania  
www.vital-logistic.ro  
comenzi@vital-logistic.ro  
+40 265-265-268

A megfelelő méret a térd  
körmérete alapján választható!  
Mármea potrivită poate fi aleasă pe baza  
măsurărilor genunchiului.

XL	47 CM - 54 CM
L	40 CM - 47 CM
M	33 CM - 40 CM
S	27 CM - 33 CM

HU  
Tájékoztatjuk, hogy az eszközöket kapcsolódóan előforduló váratlan eseményeket jelenteni kell a gyártónak és a felhasználóknak és / vagy a beteg állapotának, illetve az egészségügyi szakembereknek. A magyarországi illetékes hatóság: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet.

Vá rugalm és retineți că evenimentele neastepentate cu dispozitivul trebuie raportate producătorului și autorității competente a utilizatorului și / sau a statului membru de stabilire a pacientului. Autoritatea competentă din România: ANMDM - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor medicale din România.

**GMed BAMBUSZ TÉRDSZORÍTÓ**  
ORTEZĂ DE GENUNCHI GMed CU FIR DIN BAMBUS



S	M	L	XL
---	---	---	----



patella

XL



L



M



S



Gyártó és forgalmazó:  
Patella - 96 Kft.

2045 Törökbálint, Kistaludy u. 49-1.  
www.gmed.hu  
www.gmedbats.hu  
www.gmedbats.hu  
info@medimarket.hu  
+36 1 248-5300