


6-1-2021



## GMED KARTARTÓ HEVEDER

SUPPORT PENTRU BRAȚ GMED

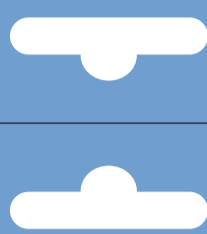

### HU

Kényelmes tartást biztosíthat a kifícamodott, törött vagy műtött végtagnak. Kulcscsont törés esetén is alkalmazható.

#### Anyaga három rétegű poliuretán ragasztott szövet:

- puha, plüss-szerű külső réteg
- párnázott középső réteg a gyűrődésmentesség érdekében
- belső réteg a szövet megerősítéséért, ami hozzájárul a szakadásmentességhez

#### Összetétel:

poliészter, szivacs, műanyag, nejlón

A csat egykezes nyitása és zárása a kartartó könnyű felhelyezését és eltávolítását teszi lehetővé. Különleges párnázott vállpántja növelheti viselőjének komfort érzetét. A megfelelő méret a magasság és testtömeg figyelembevételével mellett választható.

#### Bézs és fekete színben is elérhető!

#### Használata:

Helyezzük a kartartót a mellkasra úgy, hogy a tépőzár kifelé nézzen! A sérült kart kényelmesen helyezzük el benne, majd a tépőzár használatával zárjuk össze! A kartartó pántját vezessük át a vállon és elől rögzítsük a csat segítségével!

#### Tisztítás:

1. Hideg vízben mossuk kímélő mosószerszettel, csavarás nélkül!
2. Árnyékban, sima felületen, kiterítve szárítsuk!
3. Ne vasaljuk vagy ne alkalmazzunk száraz tisztítást!
4. Ne használjunk keféket a tisztításához!

### RO

Orteza oferă imobilizare confortabilă, ideal pentru un membru cu diverse traumatisme, leziuni sau fracturi. Poate fi utilizat și în caz de fractură a claviculei.

Fabricat din poliuretan rezistent, moale, căptușit anti-cută .

Deschiderea și închiderea cu o singură mână a cataramei permite atașarea și îndepărtarea ușoară a cotierei. Curea specială de umăr căptușită poate spori confortul utilizatorului.

Mărimea potrivită poate fi aleasă ținând cont de înălțime și greutate. Disponibil în bej și negru!

#### Utilizare:

Așezați cotiera pe piept, cu închiderea scai (velcro-ul) orientat spre exterior. Așezați brațul bolnav confortabil în interior și închideți-l folosind velcro. Treceți curea cotierei peste umăr și fixați-o în față cu catarama.

#### Curățare:

1. Se spală în apă rece cu un detergent ușor, fără a se răsuca!
2. Se usucă la umbră sau pe o suprafață plană, întinsă!
3. Nu se călca și nu folosiți curățare chimică!
4. Nu folosiți perie pentru curățare!



Verziószám: GMed kartartó heveder - 2023/06/15



DISTRIBUITOR:  
SC Vital Logistic Srl.  
540210 Tirgu Mures  
Str. Gheorghe Daja nr.177  
Corp. C1-C2 Parter Romania  
Web: www.vital-logistic.ro  
E-mail: comenzi@vital-logistic.ro  
Tel: +40 265-265-268

MÉRET	MAGASSÁG	TESTTÖMEG
S	152 cm - 163 cm	45 kg - 64 kg
M	160 cm - 178 cm	61 kg - 84 kg
L	178 cm - 193 cm	82 kg - 107 kg
XL	193 cm -	107 kg - 130 kg
XXL	193 cm -	130 kg -

MÉRET	S	M	L	XL	XXL
BÉZS					
FEKETE					



Gyártó és forgalmazó:  
Patella - 96 Kft.  
2045 Törökbalint, Kisfaludy u. 49 - 1.  
Web: www.gmed.hu  
Web: www.gyogybolt.hu  
Web: www.epapucs.hu  
E-mail: info@patellamedical.hu  
Tel.: +36 1 248-5300

26.8 cm

12.8 cm

3.2cm