

Rendeltetése, javallat, leírás:

GMed ujjrögzítő kialakításának köszönhetően a kezelőorvos által beállított módon rögzíthető a sérült ujj. Használata ajánlott mozgásszervi problémákkal küzdő betegek részére, szalag- és ínsérülések, distalis és proximális interphalangealis ujjízületi sérülések, esetleg törések esetén.



A megfelelő méret a rögzítendő ujj hossza alapján választható.

GMed ujjrögzítő tépőzáras	S	M	L	XL
Hossza	5,5 cm	8 cm	9,4 cm	10 cm

Használat, felvétel:

Távolítsa el a kék fóliát! Nyissa ki a tépőzárat!

Nyissa ki a sít, a szivacsos részre helyezze be a rögzíteni kívánt ujjat úgy, hogy a szivacsos rész alulról és felülről fedje az ujjat! Összecsukott helyzetben rögzítse a sít az ujjon a tépőzárak segítségével!

Használatkor kövesse a kezelőorvosa utasításait!

Esetleges elváltozás, bőrreakció előfordulása esetén, hagyjon fel a termék használatával, és forduljon kezelőorvosához!

Összetétel:

Alumínium, poliuretán habszivacs

Tisztítási útmutató:

Tisztítsa kézzel, enyhén szappanos vízben! Ne mossa mosógépben, és ne szárítsa ruhaszárító gépben! Tárolja száraz helyen, szobahőmérsékleten.

Tájékoztatjuk, hogy az eszközzel kapcsolatban előforduló váratlan eseményeket jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságának. A magyarországi illetékes hatóság: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet.

Gyártó és forgalmazó:

Patella – 96 Kft.

2045 Törökbálint, Kisfaludy u. 49 – 1.

Web: www.gmed.hu

Web: www.gyogybolt.hu

Web: www.epapucs.hu

E-mail: info@patellamedical.hu

Tel.: +36 1 248-5300

Distributor:

SC Vital Logistic Srl.

540210 Tirgu Mures

Str Gheorghe Doja nr 177, Corp C1-C2 Parter,
Romania

Web: www.vital-logistic.ro

E-mail: comenzi@vital-logistic.ro

Tel.: +40 265-265-268

CE

MD

VONALKÓDOK

S

M

L

XL

